




МАССАЖНОЕ КРЕСЛО F800

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

富士電機²

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

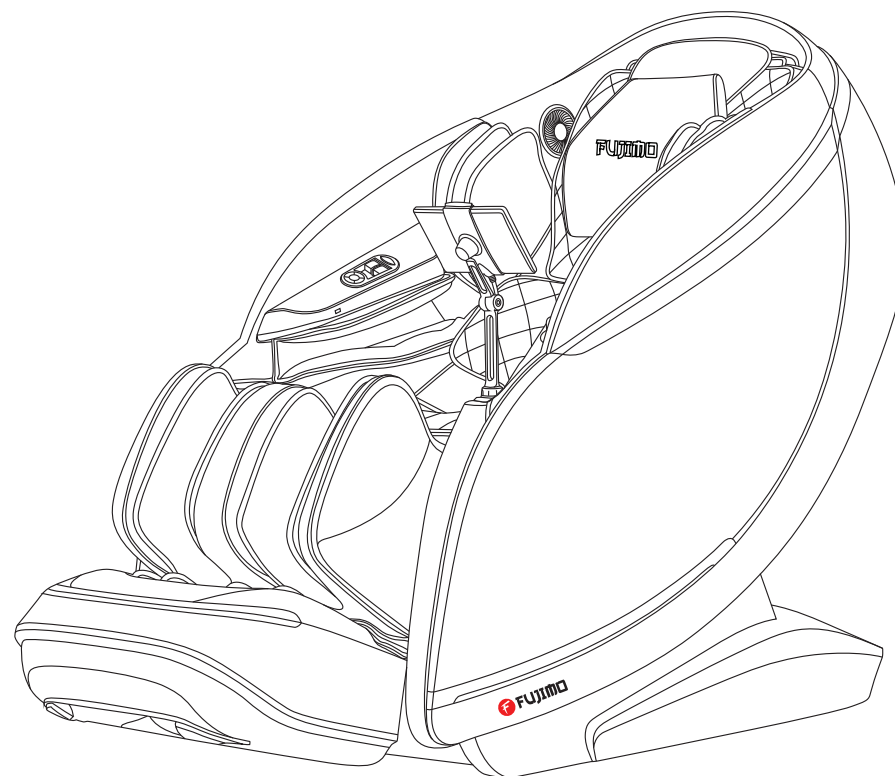

Версия 01.2024

Спасибо за покупку массажного кресла FUJIMO. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, чтобы знать, как правильно использовать кресло перед началом эксплуатации. Пожалуйста, обратите больше внимания на важные предупреждения по мерам безопасности и сохраните данное руководство для использования в будущем.

Примечание: Наша компания оставляет за собой право изменять и улучшать функционал и дизайн массажного кресла. Если есть какое-либо отличие между функциями кресла, находящегося в обращении на рынке, и описанием в данном руководстве, это является обычным обновлением продукта, и наша компания оставляет за собой право не информировать об этом в описании.

СОДЕРЖАНИЕ

Перед использованием

Меры безопасности	02 - 04
Порядок сборки	05 - 07
Размещение массажного кресла	08 - 09
Перед использованием	10 - 11
Составные части	12 - 16

Порядок использования

Порядок эксплуатации	17 - 48
Окончание массажа	49



Обслуживание

Очистка и техническое обслуживание	50
--	----


Важная информация

Устранение проблем	51
Спецификация	52
Для заметок	53


- Пожалуйста прочитайте инструкцию перед использованием
- Примечания, приведенные здесь, помогут вам безопасно и правильно использовать массажное кресло
- Для четкой градации опасности, которая может возникнуть из-за неправильного использования кресла, меры безопасности разделены на предупреждения "Внимание" и "Осторожно". Все они важны для обеспечения безопасности, и их необходимо соблюдать.

 Внимание	Указывает на то, что неправильное использование может привести к серьезным травмам или смерти.
 Осторожно	Указывает на то, что неправильное использование может привести к легким травмам или материальному ущербу.

- Пожалуйста, обратите внимание на символы по мерам безопасности.

 Запрещено	Абсолютный запрет
--	-------------------


Следующим группам лиц запрещено использовать это кресло

 Запрещено	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кресло не предназначено для лиц (включая детей) с ограниченными физическими возможностями, сенсорными или неврологическими нарушениями или которым не хватает опыта, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением и проинструктированы по использованию кресла лицами, ответственными за их безопасность. ■ Следите за детьми, чтобы они не играли с креслом. ■ Пациентам с остеопорозом. ■ Пациентам с болезнями сердца или со встроенными электронными медицинскими устройствами, такими как кардиостимулятор. ■ Людям с высокой температурой. ■ Женщинам в период беременности или менструации. ■ Людям с травмами или с кожными заболеваниями. ■ Детям без присмотра, младше 14 лет и людям с нарушенной психикой, не разрешается пользоваться данным креслом. ■ Людям, под наблюдением врача или чувствующим себя плохо. ■ Запрещено использовать кресло людям с влажным телом. ■ Кресло имеет нагреваемую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны быть внимательны при его использовании. ■ Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным представителем сервисной службы или уполномоченного на это подразделения.
---	---


Важные требования по мерам безопасности

 Внимание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям кресла. ■ Используйте хорошо заземленный источник питания, подходящий для данного кресла. ■ Выньте вилку из розетки после использования или перед чисткой, во избежание травм или повреждения кресла. ■ Эксплуатируйте кресло согласно приведенной инструкции. ■ Не используйте не рекомендованные детали и комплектующие. ■ Не используйте кресло на открытом воздухе. ■ Внимательно изучите эту инструкцию до начала эксплуатации. ■ Не используйте кресло для других целей, не перечисленных в настоящем руководстве. ■ Рекомендованное время разового использования 20 минут. ■ Не используйте кресло, если его чехол или обивка порваны. ■ Не роняйте посторонние предметы в кресло. ■ Никогда не засыпайте во время использования кресла. ■ Не используйте кресло, в состоянии опьянения и недомогания. ■ Не используйте кресло в течение одного часа после еды. ■ Не используйте кресло с чрезмерной интенсивностью, чтобы избежать каких-либо травм.
---	---

Меры безопасности

 Внимание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте соответствие напряжения характеристикам кресла. ■ Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками. ■ Не допускайте попадания воды в кресло, во избежание поражения электрическим током или поломки кресла. ■ Не тяните за шнур питания, подключая его к розетке или вынимая из розетки. Грубое обращение запрещено. ■ Не повреждайте провод и не изменяйте конструкцию кресла. ■ Не протирайте влажной тканью токоведущие части кресла. ■ В случае отключения питания не садитесь в кресло, чтобы избежать травм при внезапном восстановлении питания. ■ Немедленно прекратите использование кресла, если оно работает неправильно, и проконсультируйтесь с поставщиком. ■ Прекратите использование кресла, если почувствовали недомогание, и проконсультируйтесь со своим врачом.
---	--



Условия хранения

 Внимание	<ul style="list-style-type: none"> ■ Температура в помещении для хранения: от 5 °C до 40 °C. ■ Относительная влажность хранения (RH) от 20% до 80%; без агрессивной среды и в хорошо проветриваемом помещении.
---	--


Порядок хранения и обслуживания кресла	
<p>Внимание</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Кресло должно обслуживаться только в авторизованном сервисном центре. Запрещено разбирать или обслуживать кресло самостоятельно. ■ Выключите переключатель питания после использования. ■ Не используйте это кресло, если розетка питания расшатана. ■ Если кресло не используется в течение длительного времени, необходимо свернуть сетевой шнур и хранить кресло в сухом и непыльном месте. ■ Не устанавливайте и не храните это кресло при высокой температуре или вблизи открытого огня. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. ■ Пожалуйста, протирайте кресло сухой тканью. Никогда не используйте растворитель, бензол или спирт. ■ Механические компоненты кресла разработаны и изготовлены на весь срок эксплуатации, поэтому специального технического обслуживания не требуется. ■ Избегайте контакта кресла с острыми предметами. ■ Не перемещайте кресло по неровной поверхности. Вместо этого его следует поднять для перемещения. ■ Пожалуйста, используйте кресло постоянно. Не допускайте перерыва в работе в течение длительного периода времени.
Рабочая среда использования	
<p>Внимание</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не используйте кресло в помещениях с высокой влажностью. ■ Немедленно прекратите использование кресла при резком изменении температуры окружающей среды. ■ Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли или кислотности. ■ Не используйте кресло в небольшом помещении или в местах с плохой вентиляцией.
Устранение стандартных неисправностей	
<p>Внимание</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Если во время работы кресла раздается звук двигателя, это обычный рабочий звук, который не является неисправностью. ■ Если пульт управления не работает, проверьте, надежность подключения вилки и розетки питания, а также включение выключателя питания. ■ Если номинальное время работы кресла истекло, оно автоматически активирует кнопку выключения питания; если кресло работало в течение длительного периода времени, устройство защиты от перегрева автоматически его остановит. Кресло можно использовать снова через 30 минут.

Установка подлокотников

1. Найдите на подлокотнике соединительный штекер, соответствующий проводу световой панели на крышке подлокотника (рис. 1).
2. Надежно соедините разъем световой панели на крышке подлокотника к разъему на подлокотнике и расположите жгут проводов (рис. 2).

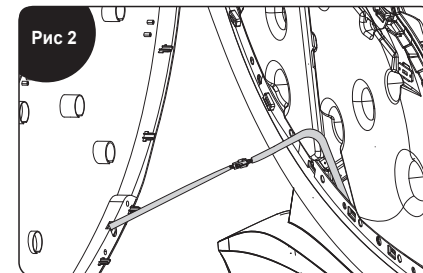
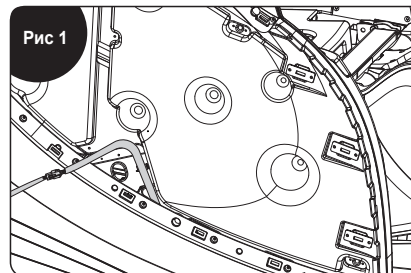


3. Совместите положение металлических скоб на крышке подлокотника с положением скоб подлокотника и зафиксируйте крышку (рис. 3).


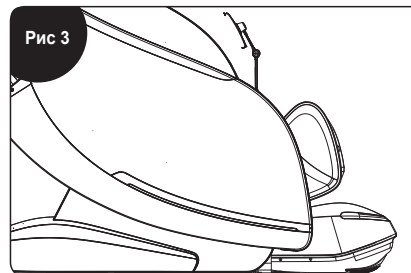


Установка подставки для ног


1. Сначала освободите провода и воздуховод от фиксации на трубе (рис. 1).
2. Соедините разъем провода и воздуховод подставки ног с разъемом провода и воздуховода в нижней части сиденья и проверьте, чтобы при соединении не возникло засорения воздуховода (рис. 2).

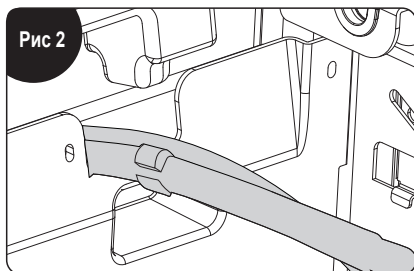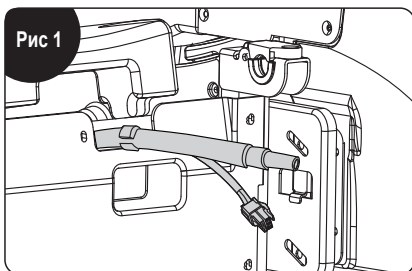

3. Откройте крышки фиксации подставки ног на левой и правой сторонах рамы сиденья массажного кресла (рис. 3).
4. Затем одновременно подвесьте подставку за левый и правый пазы рамы сиденья (рис. 4).

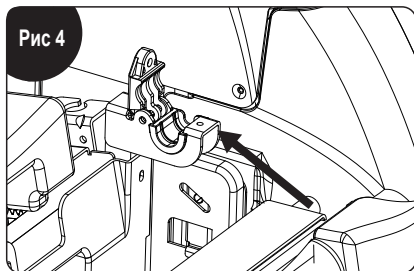
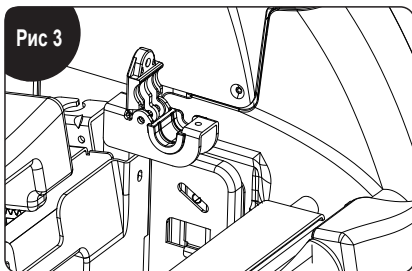


5. Закройте крышки фиксации подставки ног, а затем закрепите их с помощью 2 винтов М5 с помощью крестообразной отвертки (рис. 5). Установка подставки ног завершена.

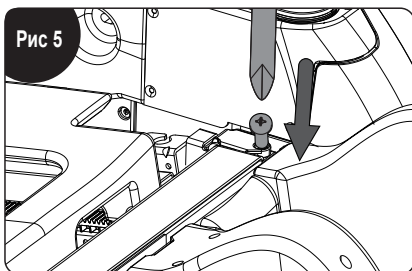

Установка подставки пульта управления


1. Достаньте подставку пульта управления из коробки запчастей и совместите нижнюю головку подставки с креплением на левом подлокотнике (рис. 1).
2. Завинтите по часовой стрелке нижнюю головку подставки пульта в крепление подлокотника, а затем до конца ее затяните (рис. 2).

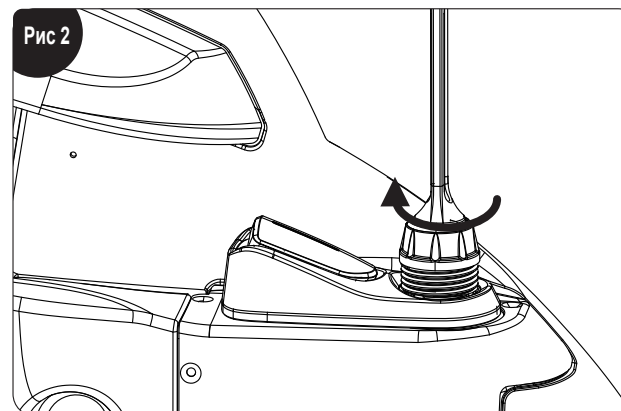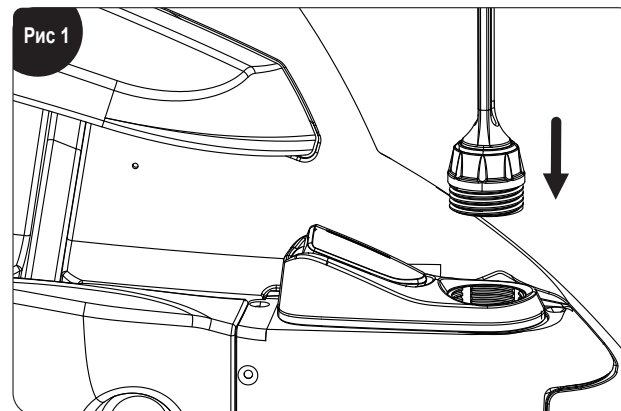

Место размещения

Убедитесь, что имеется достаточно места для наклона массажного кресла, не менее 5 см от стены.


Не подвергайте массажное кресло воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей (например, нагревательных приборов). При длительном размещении кресла в одном месте, рекомендуется постелить на пол мягкий коврик. Размер коврика должен быть достаточным, чтобы покрыть площадь касания кресла пола, включая подставку для ног в стационарном состоянии.

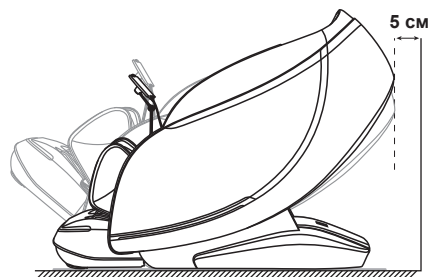

Порядок перемещения кресла

Поднимайте и передвигайте кресло вдвоем, во избежании травм.


1. Пожалуйста, поднимите массажное кресло, чтобы не повредить пол.
2. Поднимайте кресло при перемещении по деревянному полу. Избегайте повреждения задних роликов при движении. При приподнятии кресла и его перемещении, будьте осторожны, убирайте руки, чтобы избежать травм, и следите за тем, чтобы не раздавить ноги. Не отпускайте кресло до тех пор, пока оно полностью не опустилось на пол, во избежании поломок. Рекомендуется постелить на пол коврик и т. п.

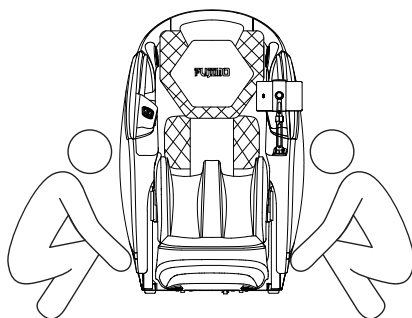

Метод Перемещения


Используйте задние ролики для перемещения кресла. Перемещайте его, наклонив вниз и назад на 45°, как показано на схеме.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерное усилие на кресло может привести к его опрокидыванию и поломке.

1. Перед перемещением, пожалуйста, выключите кресло и приведите его в стандартную позицию. Затем отключите его от сети.
2. Перемещайте кресло без кого-либо. (Без людей, животных или предметов).
3. При движении не пересекайте препятствие высотой более 2 мм или зазоры более 5 мм.
4. При перемещении кресла делайте паузу, перемещая его медленно и равномерно.

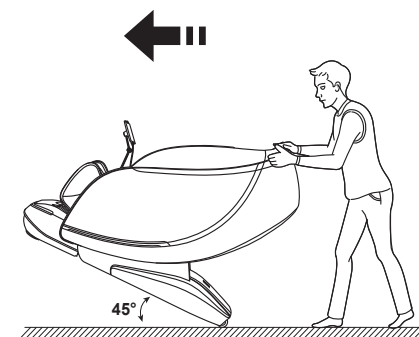

Монтаж и использование накидки на спинку и подголовника

Использование подголовника снижает интенсивность массажа шеи и плеч. Используйте его при необходимости. Накидка спинки и кресло соединены молнией (1), а подголовника и накидка спинки соединены застежкой-молнией (2).

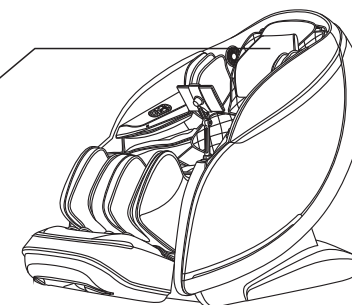


Перед использованием

Осмотритесь вокруг

Убедитесь, что вокруг кресла нет людей, домашних животных и других предметов.



ВНИМАНИЕ

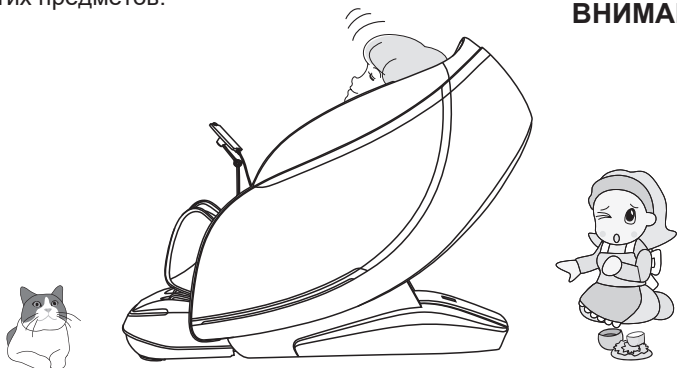

Убедитесь, что в зазорах кресла нет посторонних предметов


Перед массажем убедитесь, что в подставке ног, стопах и т.д. не попали посторонние предметы.



ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания рук, ног и головы в области между механизмом подставки ног и основным корпусом, а также в область между подлокотником и креслом.

Не размещайте руки, ноги или голову под тканевым или кожаным покрытием зоны массажа.

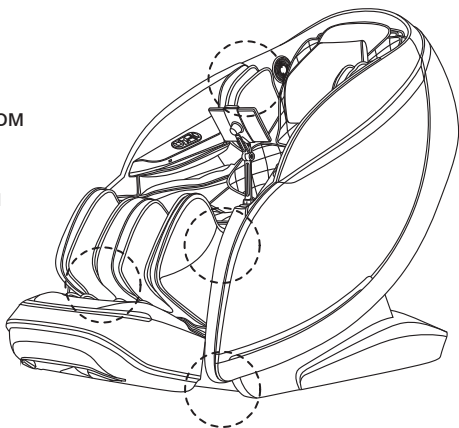


Перед использованием


Включение питания




ВНИМАНИЕ

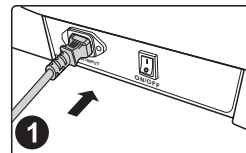

Вставьте вилку в разъем питания кресла

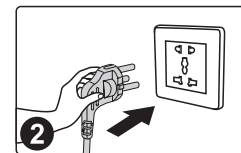

Вставьте вилку в розетку

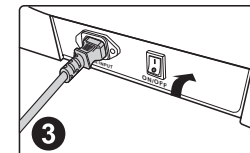

Нажмите «ВКЛ»
Кресло готово к работе




Внимание

- Пожалуйста, перед использованием проверьте шнур питания и вилку на наличие повреждений.
- Пожалуйста, подавайте питание на кресло в соответствии с требованиями к рабочему напряжению сети.
- Категорически запрещается использовать источник питания, отличный от рекомендованного питания.
- Категорически запрещается подключать различные устройства преобразования энергии без соответствующих рекомендаций производителя.

Составные части


Описание частей

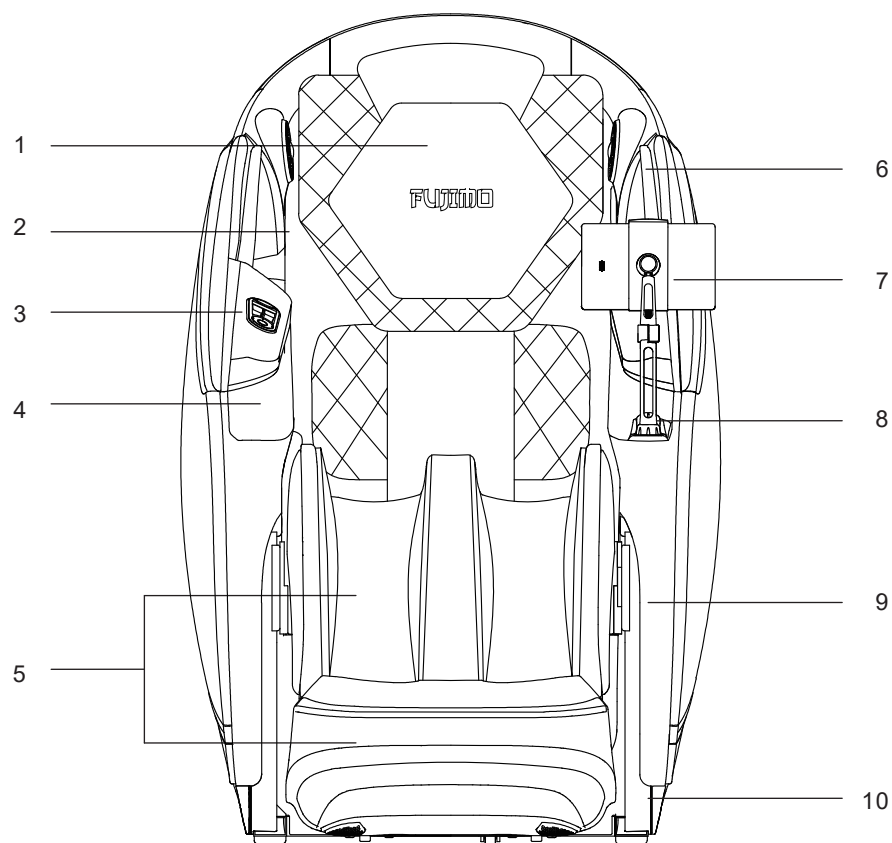

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Подголовник | 6. Воздушные подушки шеи |
| 2. Накидка для спины | 7. Сенсорный пульт управления |
| 3. Панель управления | 8. Датчик состояния здоровья |
| 4. Воздушные подушки рук | 9. Подлокотник |
| 5. Компоненты для массажа ног | 10. Боковая панель |

Составные части

Размещение функциональных элементов

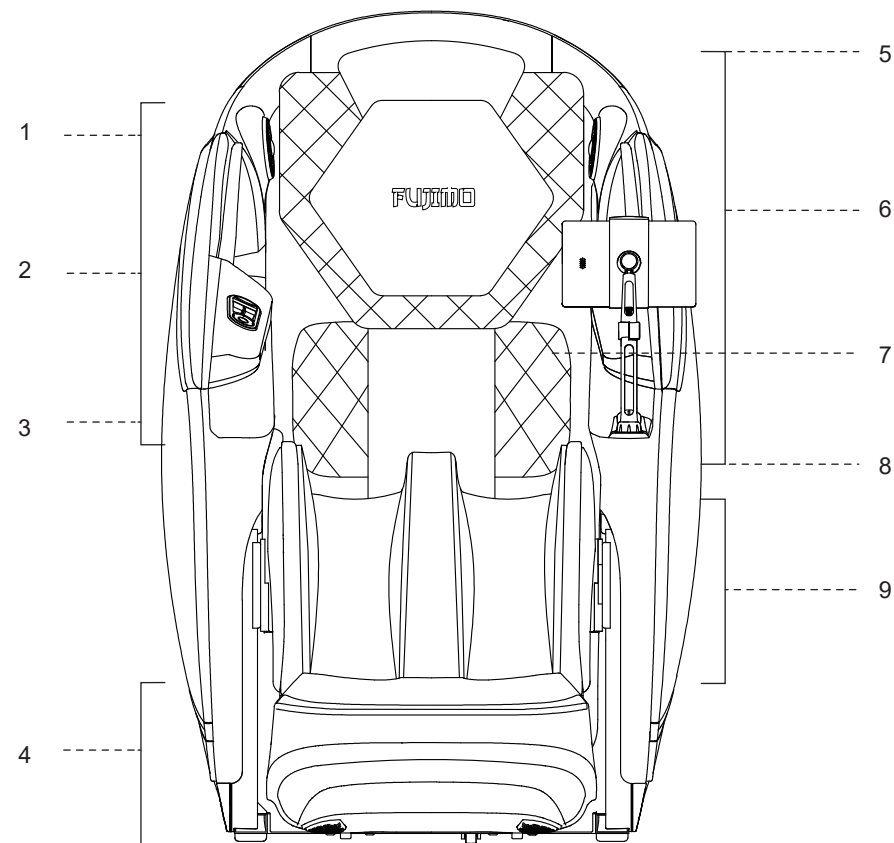


- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Плечи: Воздушный массаж | 6. Руки: Встроенный микрофон |
| 2. Руки: Воздушный массаж | управления голосом |
| 3. Ладони: Японский массаж 仁神術 | 7. Талия: Функция нагрева |
| USB-порт для зарядки | Воздушный массаж |
| 4. Стопы: Роликовый массаж | 8. Все тело: Массаж роликами |
| Воздушный массаж | 9. Икры: Воздушный массаж |
| Изменение длины (мотор) | Растирающий массаж |
| 5. Голова: Bluetooth динамики | Волновой массаж |
| Музыкальный плеер | Изменение длины (мотор) |

I. Кнопки управления сенсорного пульта




01. **Питание:** Включает или отключает функции массажного кресла.
02. **Пауза:** Останавливает массаж или выходит из режима остановки.
03. **Нагрев спины:** Включает или отключает функцию нагрева спины.
04. **Ролики:** Включает или отключает роликовый массаж стопы.
05. **Икры:** Включает или отключает разминающий массаж икр.
06. **Голос:** Включает голосовое управление.
07. **Интенсивность массажа:** Выберите один из автоматических уровней интенсивности массажа - Легкий, Приятный, Сильный.
08. **ВКЛ/ ВЫКЛ:** Включает или выключает массажное кресло.
09. **Сила компрессии в нижней части тела:** Изменяет силу воздушной компрессии в нижней части тела.
10. **Область:** Выбирает область для роликового массажа спины.
11. **Плечи:** Настраивает положение плеч и определяет параметры массажа.
12. **Меню:** Переводит в меню просмотра текущего состояния кресла.
13. **Авто:** Переводит в режим выбора автоматических программ массажа.
14. **Ручной:** Переводит в режим ручных настроек функций массажа.
15. **Наклон:** Переводит в интерфейс регулировки угла наклона кресла.
16. **Настройки:** Переводит в интерфейс меню настроек.

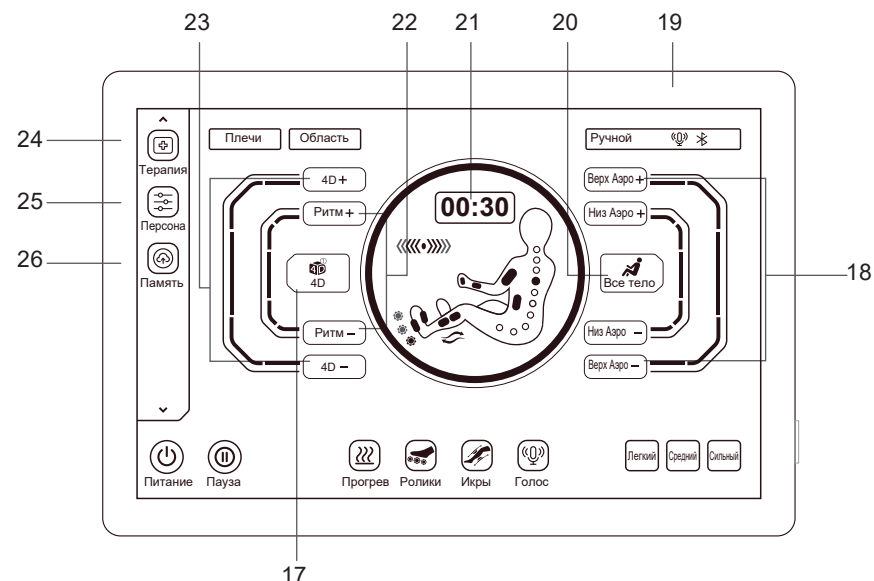

17. **Выбор техники массажа:** Выбирает технику массажа.
18. **Сила компрессии в верхней части тела:** Изменяет силу воздушной компрессии в верхней части тела.
19. **Панель текущего состояния:** Отображает информацию о состоянии текущего массажа.
20. **Выбор зоны воздушной компрессии:** Выбирает зону компрессии.
21. **Меню настройки времени:** Регулирует время массажа.
22. **Скорость массажа:** Регулирует скорость массажа.
23. **Интенсивность 4D массажа:** Регулирует интенсивность 4D.
24. **Терапия:** Открывает интерфейс оценки состояния здоровья.
25. **Персона:** Открывает пользовательский интерфейс.
26. **Память:** Открывает интерфейс памяти программ массажа.

II. Кнопки панели управления на подлокотнике

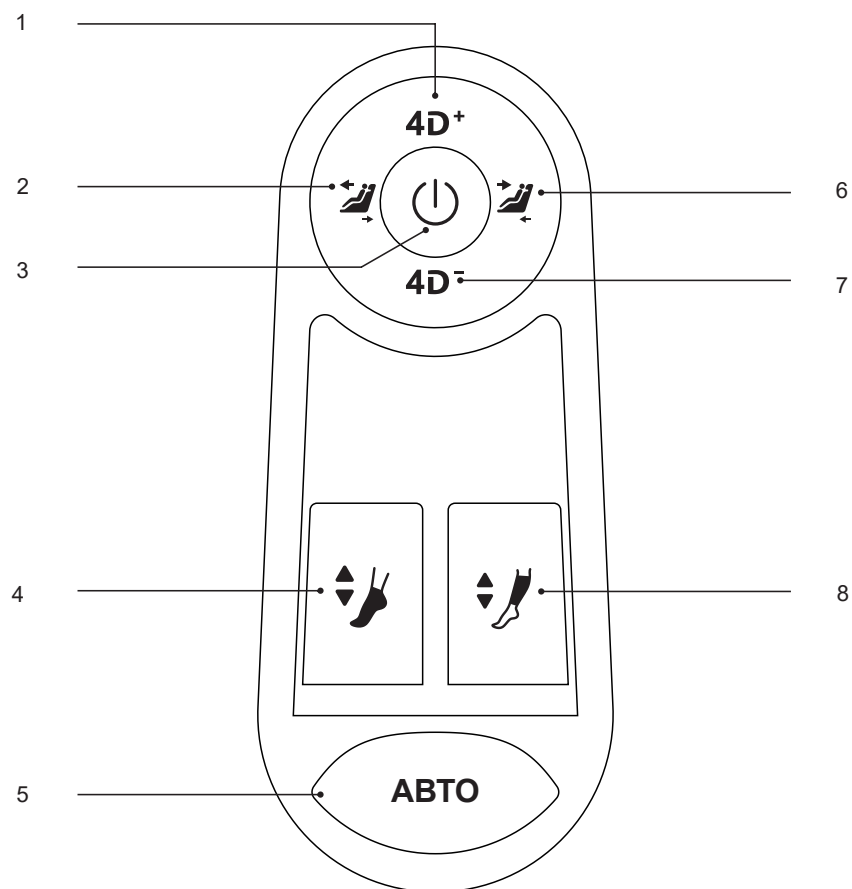

1. **4D+ интенсивность:** Нажмите для увеличения силы массажа до 5 уровней.
2. **Поднимание кресла:** Регулирует угол наклона массажного кресла вверх.
3. **ВКЛ/ВЫКЛ:** Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы включить или выключить кресло. После включения массажа короткое нажатие - это Пауза/Запуск.
4. **Выдвижение блока стопы:** Регулирует длину блока стопы подставки ног.
5. **АВТО:** автоматическое переключение программ массажа.
6. **Опускание кресла:** Регулирует угол наклона массажного кресла вниз.
7. **4D- интенсивность:** Нажмите для уменьшения силы массажа до 1 уровня.
8. **Выдвижение блока икр:** Регулирует длину блока икр подставки ног.


III. Старт массажа

1. Длительно нажмите боковую кнопку ВКЛ/ВЫКЛ сенсорного пульта управления или длительно нажмите клавиши вкл/ выкл подлокотника.



Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
Длительно нажмите эту кнопку для включения кресла


2. После включения выберите интенсивность массажа, нажав любую из кнопок "Мягкий" , "Средний" или "Сильный" на экране пульта. Это активирует работу кресла и переводит его в положение лежа. Если в течение 5 минут кнопка не выбрана, кресло автоматически выключится.

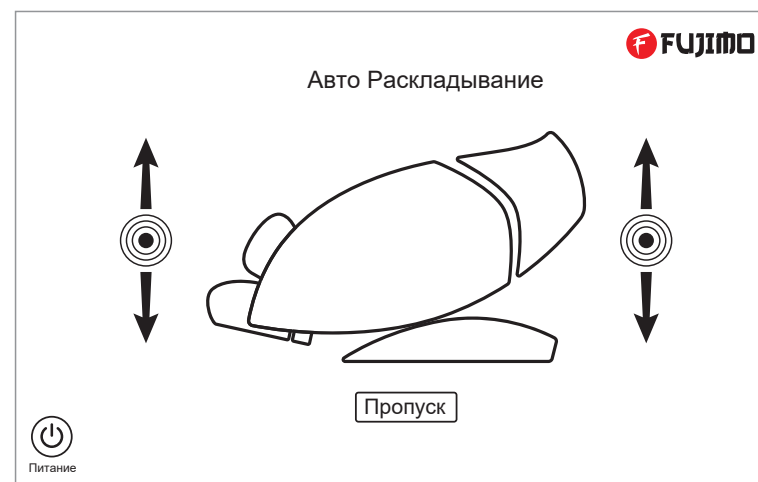


3. Для автоматического раскладывания выберите любую автопрограмму, после чего кресло начнет наклон в положение невесомости. Дождитесь окончания наклона или пропустите этот шаг, нажав кнопку .

Порядок эксплуатации


4. Дождитесь, пока не будет завершено сканирование тела. Нажмите **Пропуск** чтобы пропустить сканирование и начать массаж сразу.

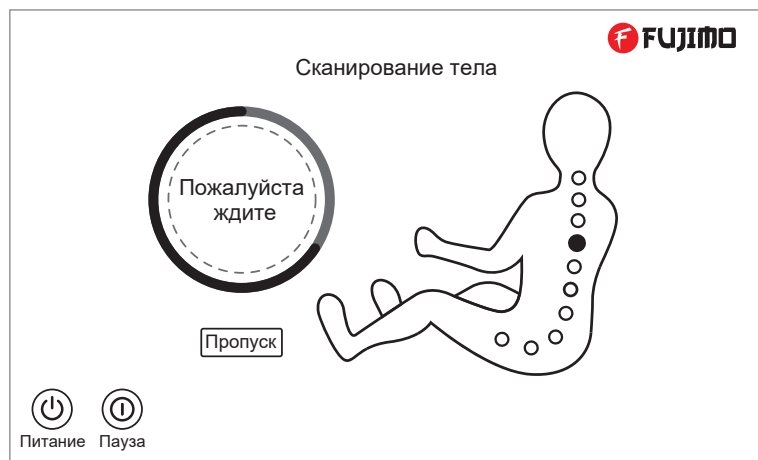

Для точной настройки положения плеч после сканирования тела, на экране пульта появится напоминание о корректировке положения. Если положение роликов соответствует вашим потребностям, нажмите кнопку ОК, чтобы начать массаж. Если нет, используйте кнопки "Вверх" ▲ и "Вниз" ▼, чтобы изменить положения массажных роликов, а затем нажмите клавишу "ОК", для начала массажа. Если в течение 20 секунд не будет произведено никаких действий, текущее положение массажных роликов запомнится по умолчанию и начнется массаж.

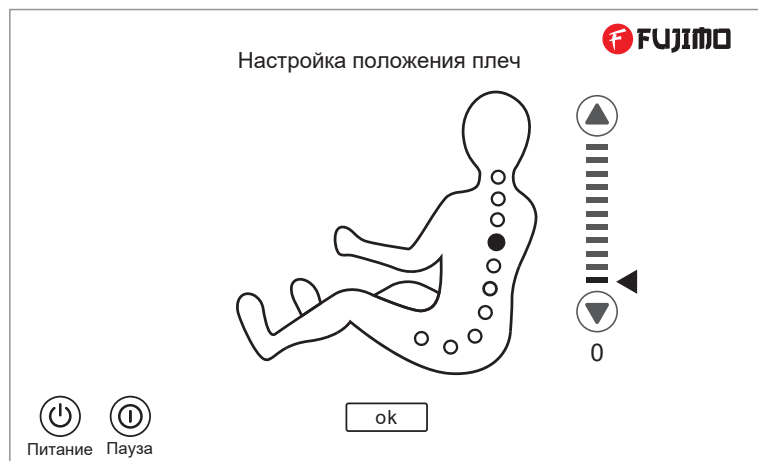

Порядок эксплуатации

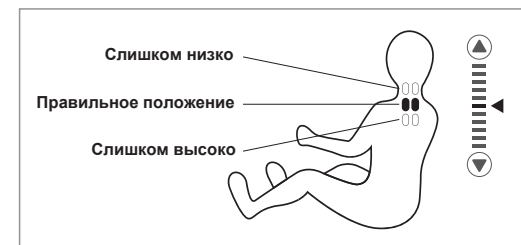

IV. Функция Пауза (используйте эту функцию после включения кресла)

После включения кресла нажмите кнопку пауза **⏸**, для приостановки массажа. Нажмите кнопку пауза **⏸** еще раз, чтобы возобновить массаж. Примечание: В состоянии паузы все функции не работают, кроме выключения.

V. Автопрограммы (используйте эту функцию после включения кресла)

Интерфейс выбора автоматических программ

- (1) Нажмите кнопку АВТО **⏻** в левой строке меню, чтобы войти в интерфейс выбора авто программ.
- (2) На выбор есть 20 автоматических программ: Бинарный массаж, Антистресс, Мягкая компрессия, Китайский, Тайский, Релакс мышц, Шея и Плечи, Поясница, Талия и Бедр, Терапия ног, Президент, Грация, Семья, Менеджер, Актив, Энергия жизни, Сиеста, Сон, Интеллект, Ренессанс.
- (3) Выберите нужную автоматическую программу, чтобы начать массаж.



Интерфейс выбора автоматических программ массажа

Порядок эксплуатации

Содержание массажа (Расслабление и Активация)	
Программа	Описание
Бинарный массаж	Верхний массажный механизм используется для массажа шеи, плеч и стимуляции акупунктурных точек Фэнчи при помощи разминания, а затем включается постукивающий и шиацу массаж всего тела. Нижний массажный механизм массирует талию и бедра с помощью разминания и постукивания. Два массажных механизма синхронно взаимодействуют друг с другом, помогая расслабить мышцы всего тела и снять усталость.
Анти стресс	Программа нацелена на массаж шеи и плеч со стимуляцией акупунктурных точек Дачжуй. Для этого в основном применяется разминание, что помогает снять мышечное напряжение и стресс.
Легкая компрессия	Программа использует технику легкой воздушной компрессии всего тела, с добавлением роликового массажа стоп, а также растирающего массажа икроножных мышц с дополнительной волнообразной стимуляцией акупунктурных точек Венгджонг. Это способствует похудению, расслаблению и быстрому восстановлению жизненных сил.
Китайский массаж	Программа использует в основном традиционную китайскую технику 4D массажа спины и талии, что улучшает кровообращение в этих зонах, успокаивает и освобождает меридианы внутренней энергии и снимает блокировку спины и талии посредством направленного воздействия.
Тайский массаж	Программа использует в основном воздушную компрессию, которая фиксирует ноги, руки, плечи и бедра. После этого подставка для ног и спинка кресла наклоняются для достижения растягивающего эффекта. Одновременно с этим, ролики массажного 4D-механизма удерживаются в области поясницы, так что тело находится в состоянии тайской растяжки. Примечание: Амплитуда растяжки имеет три уровня интенсивности: выберите самую легкую амплитуду для мягкого растяжения; выберите среднюю, если амплитуда растяжки умеренная; выберите сильную амплитуду для максимального растягивания.

Порядок эксплуатации

Содержание массажа (Полноценный Отдых)	
Программа	Описание
Релакс мышц	Программа нацелена на массаж поясницы, спины, плеч и шеи с помощью техники разминания, постукивания и шиацу. Это пробуждает жизненную энергию, стимулируя физическую активность благодаря глубокому массажу всего тела с высокой интенсивностью. Подходит людям, испытывающим сильные физические нагрузки, таким как спортсмены, для стимуляции потенциала перед соревнованиями.
Шея и плечи	Программа выполняет массаж шеи и плеч, главным образом, при помощи техники разминающего и растягивающего воздействия. Также проводится массаж верхней части спины с помощью оздоровительной терапии, с надавливающей стимуляцией акупунктурных точек Цзяньцзин, что облегчает напряжение шейного отдела, снимает симптомы возникновения спондилеза и создает эффект расслабления мышц шеи и плеч.
Поясница	Программа выполняет массаж области поясницы, при помощи техники разминающего, постукивающего и комбинированного (разминание с постукиванием) воздействия. Затем начинается выполнение усиленного 4D-массажа поясницы.
Талия и бедра	Программа выполняет массаж области ягодиц при помощи разминающего воздействия и оздоровительной терапии. Затем активируется постукивающий и разминающий массаж, который глубоко прорабатывает зону ягодиц и таза, чтобы расслабить мышцы бедер и тонизировать область таза и ягодиц. Это особенно подходит для поддержания женского и мужского здоровья, а также для профилактики заболеваний простаты.
Терапия ног	Программа выполняет массаж плеч и поясницы, преимущественно с помощью разминающей, постукивающей и комбинированной (разминающий массаж с постукиванием) техники. Дополнительно выполняется воздушно-компрессионный массаж икр и ступней, который совмещается с успокаивающим волнообразным растирающим массажем икр и разминающим массажем ступней.

Порядок эксплуатации


Содержание массажа (Эксклюзивно для семьи)	
Программа	Описание
Президент	Программа выполняет массаж плеч, шеи, спины и поясницы с помощью разминающей, похлопывающей техники, а также разминания с постукиванием. Благодаря глубокому массажу снимается усталость и стресс, улучшается кровообращение. Программа подходит для мужчин и выполняется со средней интенсивностью.
Грация	Программа выполняет массаж плеч, шеи, талии и ягодиц с помощью разминающей и шиацу техники, воздействуя на все тело. Это позволяет расслабить тело и разум, наслаждаясь воздействием высочайшего уровня. Программа особенно рекомендована для женщин и выполняется с низкой интенсивностью.
Семья	Программа выполняет воздушно-компрессионный массаж для всего тела, дополнительно используя роликовый массаж стоп и растирающий массаж икр. В этой программе отменена функция растяжки икр. Программа подходит для пожилых людей и пользователей, испытывающих большую нагрузку на спину. Интенсивность массажа средняя.
Менеджер	Программа выполняет массаж плеч, шеи и поясницы с помощью разминающей, похлопывающей техники и разминания с постукиванием. Благодаря глубокому массажу снимается боль в плечах и шее, уходят спазмы мышц поясничного отдела позвоночника. Программа подходит для офисных работников и людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Интенсивность массажа средняя.
Актив	Программа выполняет глубокий массаж всего тела с помощью разминающей, похлопывающей и надавливающей техники. Это улучшает циркуляцию крови по всему телу и предотвращает образование тромбов. Программа подходит для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и не любят выходить из дома. Интенсивность массажа умеренно средняя.


Порядок эксплуатации

Содержание массажа (Искусственный интеллект)	
Программа	Описание
Энергия жизни	Программа использует глубокий массаж всего тела с помощью техники разминания, постукивания и шиацу, чтобы пробудить жизненные силы человеческого тела и стимулировать энергию.
Сиеста	Программа использует массаж спины и талии с помощью техники разминания и постукивания. Особое внимание уделяется стимуляции акупунктурных точек Шэньюй, что улучшает качество короткого отдыха, чтобы пользователь был более энергичным во второй половине дня.
Сон	Программа использует технику массажа плеч, шеи, спины и поясницы с помощью разминающего и оздоровительного воздействия. Особое внимание уделяется стимуляции акупунктурных точек Фэнчи и Шэньюй, что улучшает качество сна и облегчает подготовку ко сну. Подходит для людей, страдающим от бессонницы.
Интеллект	Программа выполняет массаж плеч, шеи, спины и талии с помощью разминания, глубокого 4D разминания и техники шиацу для достижения высокой степени физической и душевной гармонии, посредством глубокого воздействия. Программа подходит для людей умственного труда и снимает повышенную нагрузку. Интенсивность массажа слабая.
Ренессанс	Программа выполняет массаж спины и поясницы с помощью разминающей, похлопывающей и надавливающей техники. Это улучшает кровообращение, устраняет локальные мышечные боли, ускоряет выведение молочной кислоты и восстанавливает жизненную энергию пользователя.





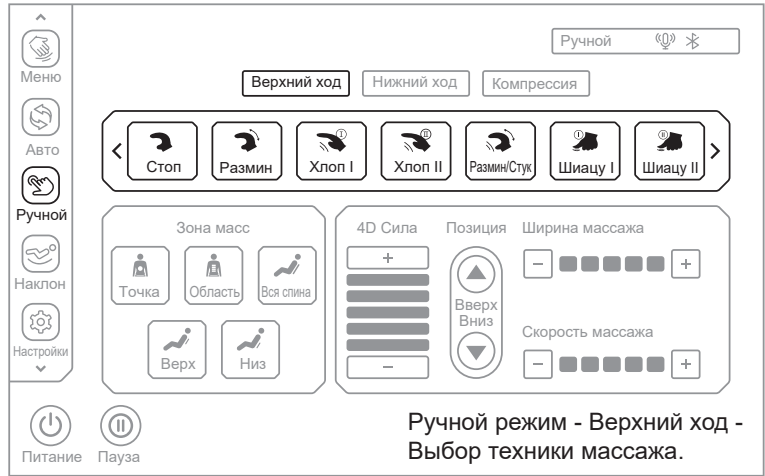


Порядок эксплуатации

VI. Ручной режим (используйте эту функцию после включения кресла)

1. Нажмите кнопку  в левом столбце, для входа в меню Ручного режима, для выбора массажа верхнего или нижнего механизма, а также компрессии.
- (1). В Ручном режиме (рисунок ниже), кнопка «Верхний ход» активирует виды, зону, интенсивность 4D, ширину, скорость и другие функции массажа верхнего массажного механизма.
- (2). Раздел «Верхний ход» включает 7 видов массажа: Стоп, Размин, Хлопки I и II, Размин с постукиванием, Шиацу I и II, Защип, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV и т. д. (Кнопка < Стрелка влево и Стрелка вправо > прокручивает виды массажа).

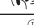


Ручной режим - Верхний ход -
Выбор техники массажа.






Виды	Настройки массажного механизма	
Стоп		Все виды массажа выключены.
Размин		Изменение скорости и интенсивности.
Хлоп I		Изменение скорости, интенсивности и ширины.
Хлоп II		Изменение скорости, интенсивности и ширины.
Размин/Стук		Изменение скорости и интенсивности.
Шиацу I		Изменение скорости, интенсивности и ширины.
Шиацу II		Изменение скорости, интенсивности и ширины.
Защип		Изменение скорости и интенсивности.
4D I		Изменение скорости и интенсивности.
4D II		Изменение скорости и интенсивности.
4D III		Изменение скорости, интенсивности и ширины.
4D IV		Изменение скорости, интенсивности и ширины.

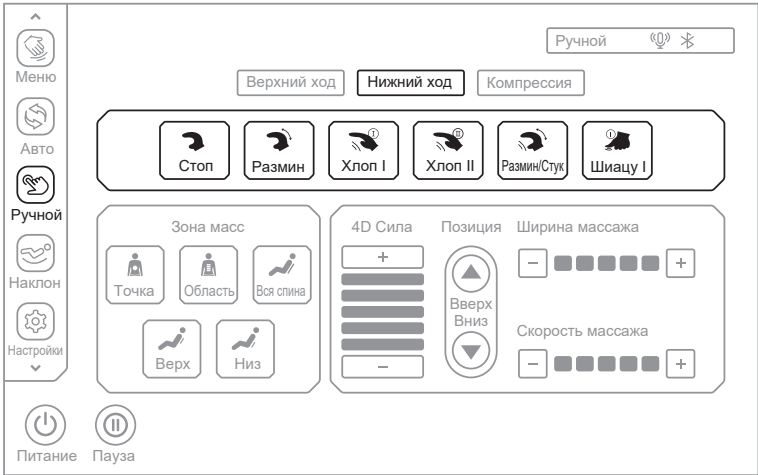Порядок эксплуатации

- (3). В Ручном режиме (рисунок ниже), кнопка «Нижний ход» активирует виды, зону, интенсивность, ширину, скорость и другие функции массажа нижнего массажного механизма.
- (4). Раздел «Нижний ход» включает следующие виды массажа: Стоп, Размин, Хлопки I и II, Размин с постукиванием, Шиацу I и другие варианты массажа.




Ручной режим - Нижний ход - Выбор техники массажа.

Виды	Настройки массажного механизма	
Стоп		Все виды массажа выключены.
Размин		Изменение скорости и интенсивности.
Хлоп I		Изменение скорости, интенсивности и ширины.
Хлоп II		Изменение скорости, интенсивности и ширины.
Размин/Стук		Изменение скорости и интенсивности.
Шиацу I		Изменение скорости, интенсивности и ширины.

Порядок эксплуатации


Примечание: В интерфейсе “Текущее состояние” нажмите клавишу “Техника массажа” (только для массажа верхнего механизма), для выбора техники массажа во всплывающем меню “Массаж”.

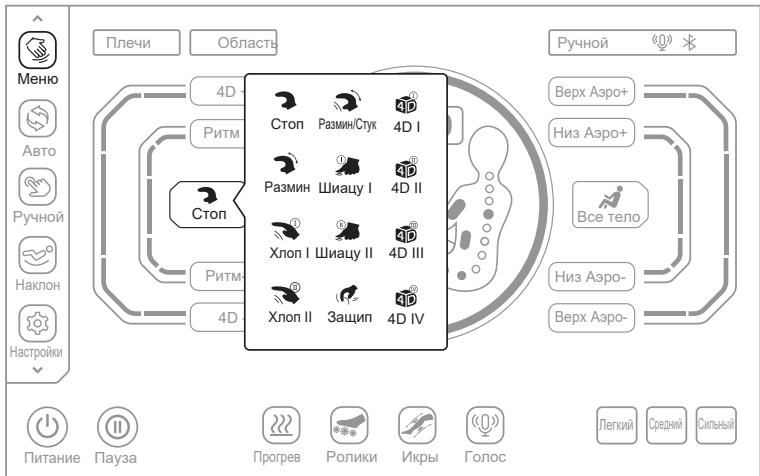

Текущий статус - Верхний ход - Выбор техники массажа.

2. Зона массажа: После входа в интерфейс “Ручной”, выберите кнопку “Верхний ход” или “нижний ход” для выбора требуемой зоны массажа.

(1). Ручной (верхний механизм): Доступно 5 массажных зон, включая фиксированную точку, область, всю спину, верх спины и поясницу. Выберите соответствующую область в меню, чтобы выполнить массаж.

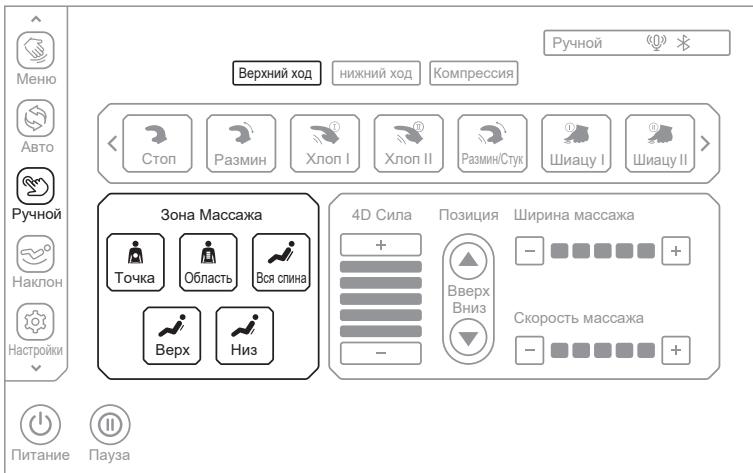


Ручной массаж - Верхний ход - описание выбора зоны массажа

Порядок эксплуатации

Кнопка	Описание
	Массаж фиксированной точки в фиксированном зоне.
	Локальный массаж небольшой области взад и вперед.
	Полный массаж всей спины взад и вперед.
	Массаж верхней части спины взад-вперед.
	Массаж нижней части спины взад-вперед.

(2). Ручной (нижний механизм): Доступно 5 массажных зон, включая фиксированную точку, область, всю спину, верх спины и поясницу. Выберите соответствующую область в меню, чтобы выполнить массаж.

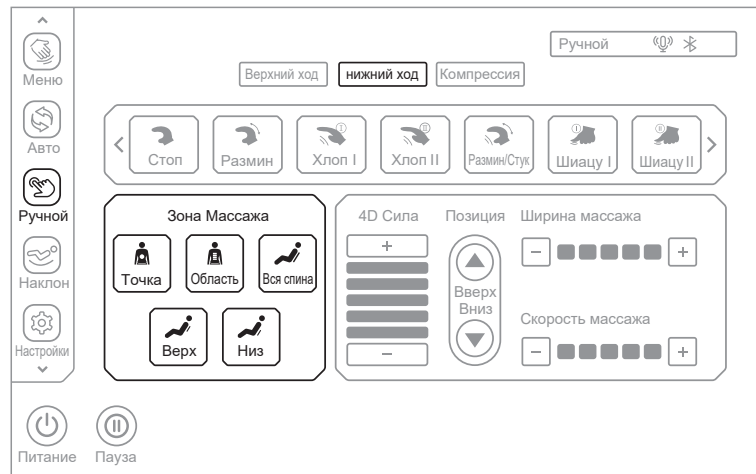


Ручной массаж - нижний ход - описание выбора зоны массажа



Кнопка	Описание
	Массаж фиксированной точки в фиксированном зоне.
	Локальный массаж небольшой области взад и вперед.
	Полный массаж всей спины взад и вперед.
	Массаж верхней части спины взад-вперед.
	Массаж нижней части спины взад-вперед.


Порядок эксплуатации

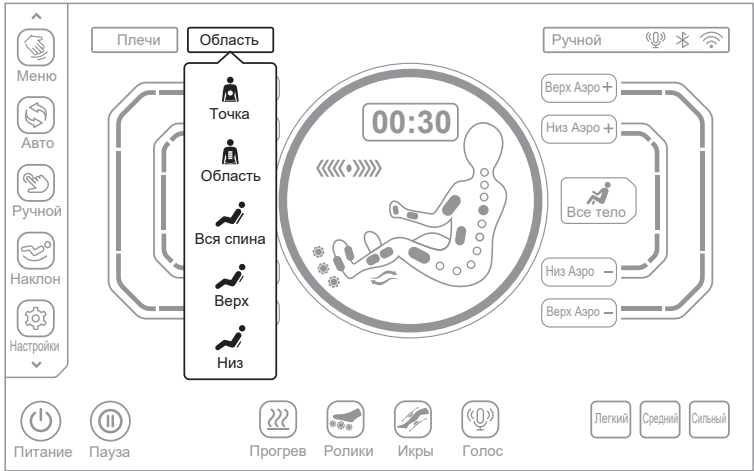Примечание: Нажмите кнопку **Область** в "Текущем состоянии"  , для выбора области массажа из всплывающего меню (функция активна только для настройки массажа верхнего механизма на странице текущего состояния).




Текущий статус - Верхний ход - Выбор зоны массажа.


3. Вы можете настроить силу 4D массажа в меню Верхний ход. Доступно 5 уровней интенсивности, причем 1 - самая слабая, а 5 - самая сильная. Чем сильнее сила 4D, тем больше выступ массажных роликов вперед. Выберите кнопку "плюс"  или "минус"  , чтобы изменить силу 4D.

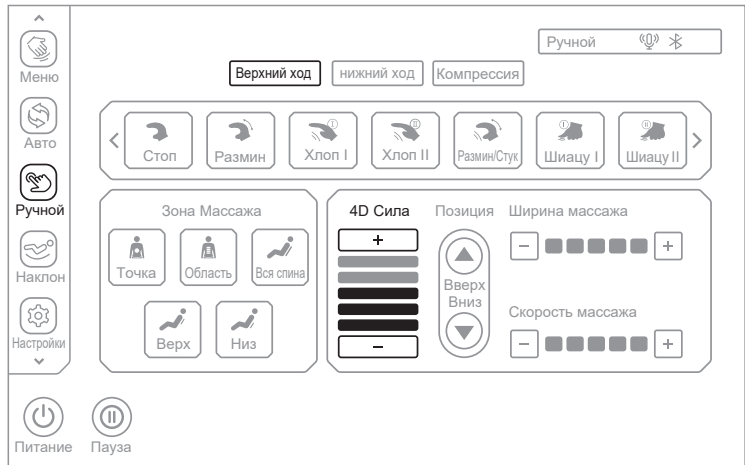


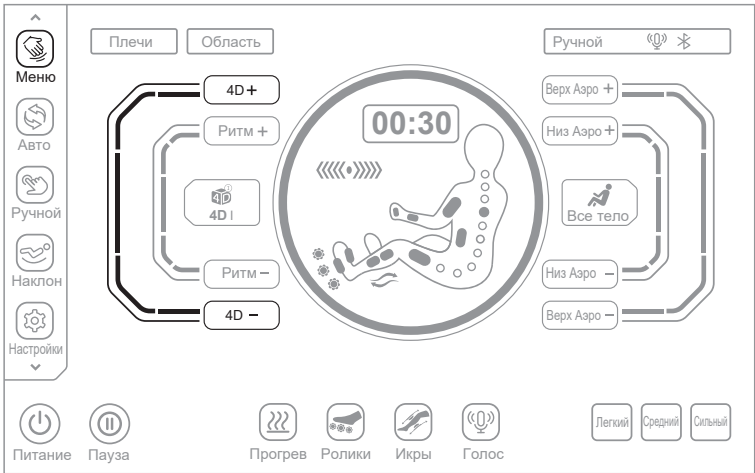
Ручной режим - Верхний ход - описание выбора интенсивности 4D.

Порядок эксплуатации

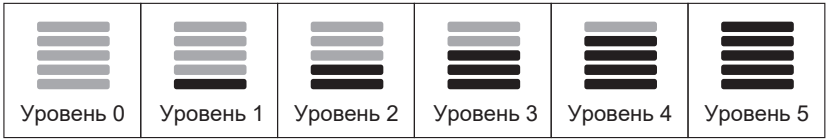



Кнопка	Описание
	Нажмите для увеличения силы 4D массажа с 1 по 5 уровень.
	Нажмите для уменьшения силы 4D массажа с 5 по 1 уровень.

Примечание: Вы можете настроить силу 4D кнопками **4D +** или **4D -** в интерфейсе  "Текущее состояние". ((Эта функция является быстрым способом настройки интенсивности 4D прямо на странице текущего состояния Ручного режима только для верхнего механизма).






Текущий статус -ручной режим - Верхний ход - настройка 4D интенсивности

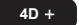

Кнопка	Описание
	Нажмите для увеличения силы 4D массажа с 1 по 5 уровень.
	Нажмите для уменьшения силы 4D массажа с 5 по 1 уровень.


Порядок эксплуатации

4. При выборе точечного и локального массажа можно отрегулировать массажные ролики с помощью стрелок вверх  или вниз , чтобы точно настроить положение роликов массажных механизмов вверх или вниз.

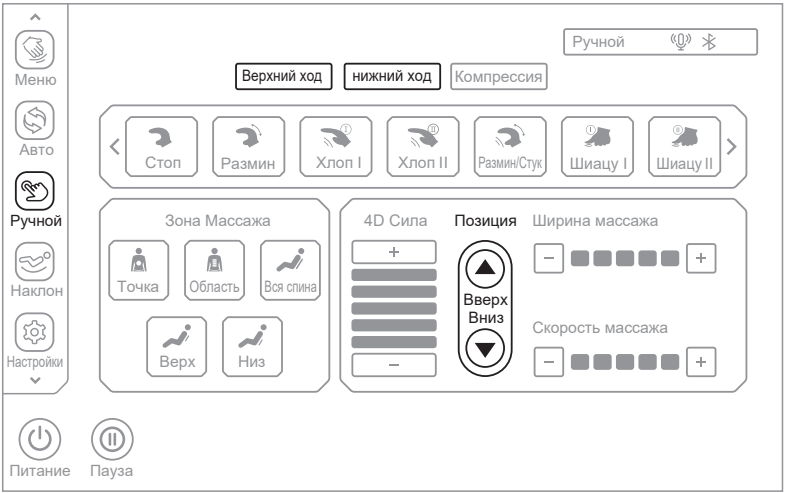

Ручной режим - Верхний ход и нижний ход - настройка положения роликов

5. Настройка ширины массажа: После входа в интерфейс ручного меню, как показано на рисунке ниже, выберите кнопку "Верхний ход" или "нижний ход" в соответствии со своими потребностями для регулировки ширины массажа.

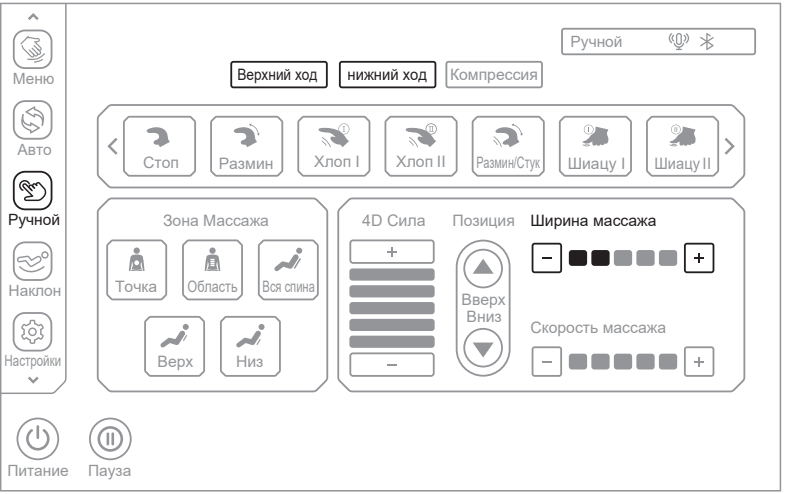



Ручной режим - Верхний ход и нижний ход - настройка ширины массажа


Порядок эксплуатации

- (1) Ширину можно регулировать только при переходе в ручной режим при выборе техники массажа или зоны массажа.
- (2) Ширина массажа доступна в диапазоне от 1 до 5 уровня, причем 1 - самая узкая, а 5 - самая широкая. Пожалуйста, используйте регулировку ширины при следующих техниках: Похлопывание I и II, Шиацу I и II, 4D III и 4D IV.



Кнопка	Описание
	Нажмите кнопку, для увеличения ширины массажа, от 1 до 5 уровня.
	Нажмите кнопку, для уменьшения ширины массажа, от 5 до 1 уровня.

6. Настройка скорости массажа: После входа в интерфейс ручного меню, как показано на рисунке ниже, вы можете выбрать кнопку "Верхний ход" или "нижний ход" в соответствии со своими потребностями для регулировки скорости массажа.

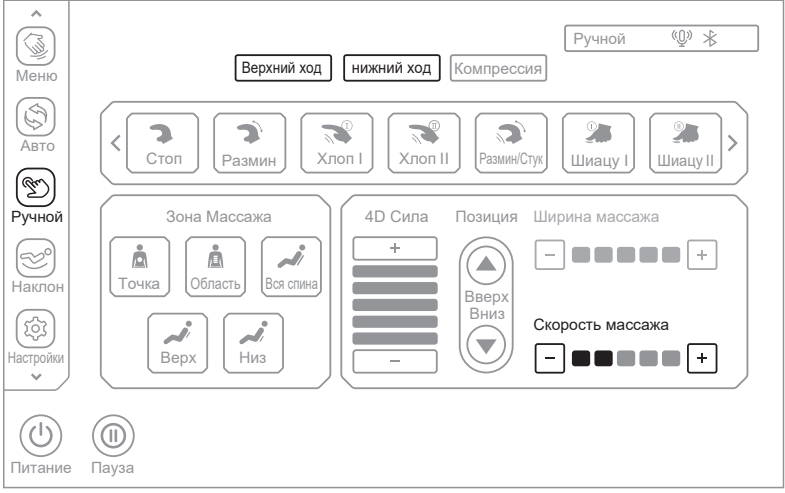


Ручной режим - Верхний ход и нижний ход. Настройка скорости массажа

- (1) Скорость можно регулировать только при переходе в ручной режим при выборе техники массажа или зоны массажа.
- (2) Скорость доступна в диапазоне от 1 до 5 уровня, 1 - самая медленная, а 5 - самая быстрая. Скорость не настраивается если не выбрана техника.

Порядок эксплуатации

Уровень 0	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
Кнопка	Описание				
	Нажмите кнопку, для увеличения скорости массажа, от 1 до 5 уровня.				
	Нажмите кнопку, для уменьшения скорости массажа, от 5 до 1 уровня.				

Примечание: Вы можете настроить скорость кнопками **Ритм +** или **Ритм -** в интерфейсе "Текущее состояние". ((Эта функция является быстрым способом настройки скорости массажа на странице текущего состояния)).

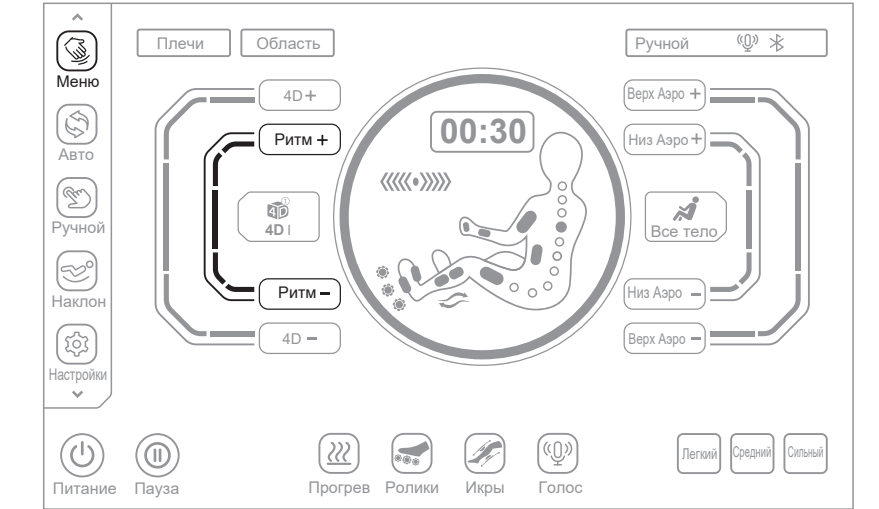


Текущее состояние - Настройка скорости массажа.

Уровень 0	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
Кнопка	Описание				
	Нажмите кнопку, для увеличения скорости массажа, от 1 до 5 уровня.				
	Нажмите кнопку, для уменьшения скорости массажа, от 5 до 1 уровня.				

Порядок эксплуатации


7. Для проведения воздушного массажа, войдите в меню Компрессия, как показано на рисунке ниже, чтобы выбрать режим воздушной компрессии. Воздушный массаж включают в себя массаж верхней части тела, нижней части тела и всего тела. Функция компрессии будет отключена при выключении всех вышеперечисленных режимов.

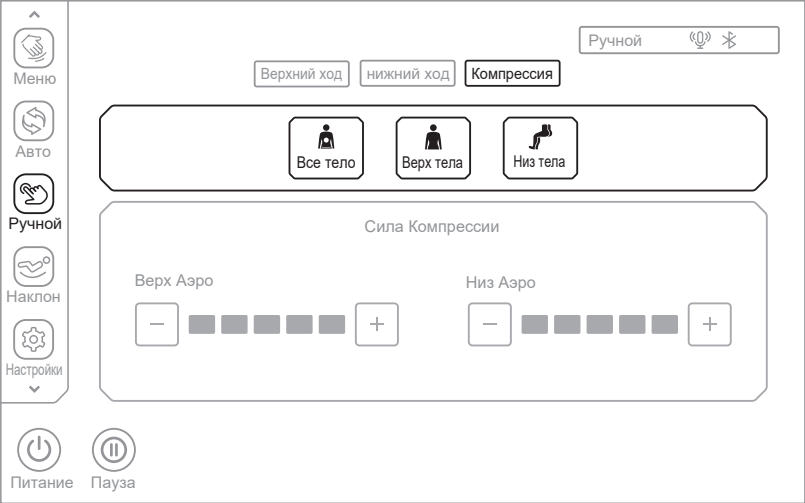


Кнопка	Описание
	Нажмите, для включения или отключения аэро массажа всего тела.
	Нажмите, для включения или отключения аэро массажа верха тела.
	Нажмите, для включения или отключения аэро массажа низа тела.

Индикация воздушной копрессии		
Компрессия верха тела	Компрессия низа тела	Компрессия всего тела


Порядок эксплуатации

Примечание: Вы можете настроить компрессию кнопкой  в интерфейсе "Текущее состояние". ((Эта функция является быстрым способом настройки компрессионного массажа на странице текущего состояния)).

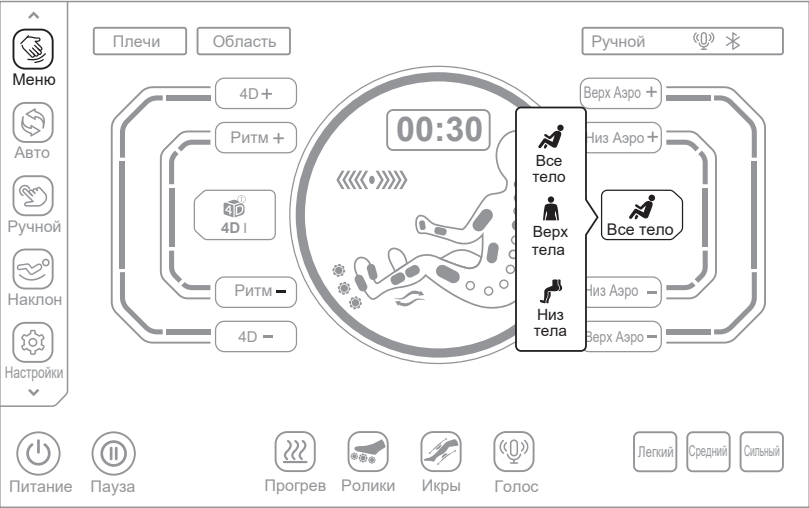





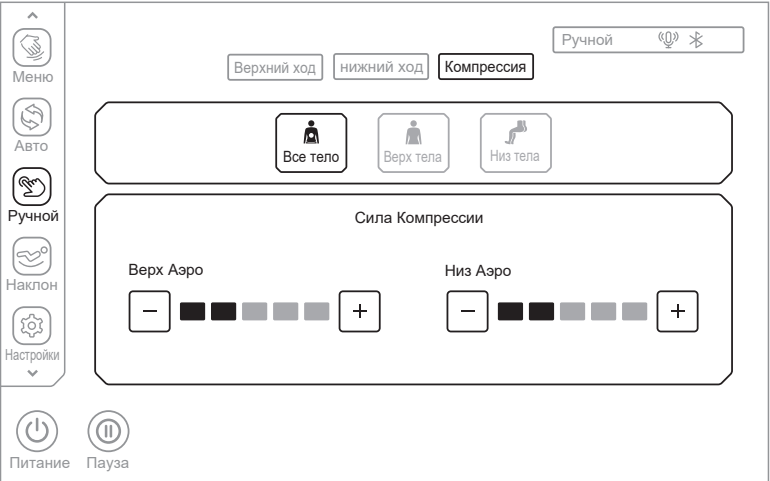


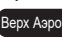




Текущее состояние - Настройка воздушной компресии.


8. Для настройки интенсивности воздушной компресии, она должна быть активирована. На выбор доступно 5 уровней компресии, где 1 уровень является самым слабым, а 5 - самым сильным.



Порядок эксплуатации

					
Уровень 0	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
Кнопка	Описание				
	Нажмите кнопку, для увеличения силы компресии, от 1 до 5 уровня.				
	Нажмите кнопку, для уменьшения силы компресии, от 5 до 1 уровня.				

Примечание: Вы можете установить силу компресии верха тела кнопками:  и  в интерфейсе "Меню" ; а также установить интенсивность компресии низа тела кнопками:  и . Для регулировки доступно 5 уровней компресии.

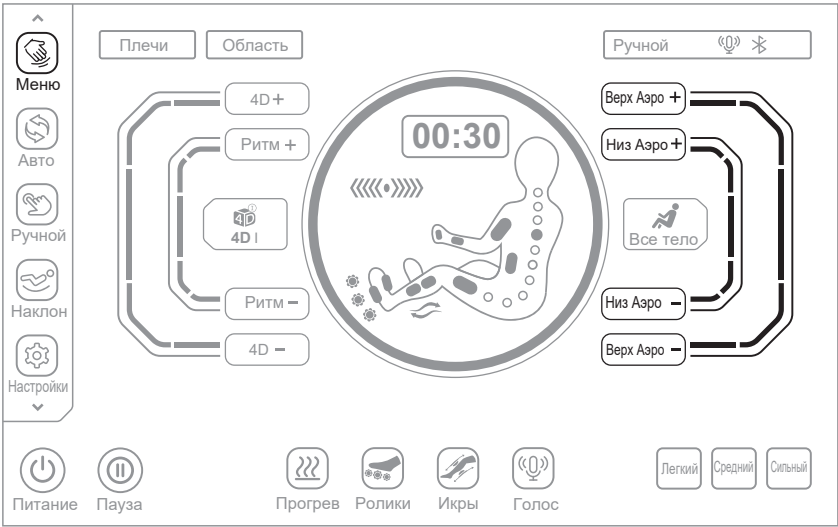

Текущее состояние - Настройка интенсивности воздушной компресии.


					
Уровень 0	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5

Порядок эксплуатации

Кнопка	Описание
	Нажмите кнопку, чтобы увеличить интенсивность компрессии в пределах от 1 до 5 уровня.
	Нажмите кнопку, чтобы уменьшить интенсивность компрессии в пределах от 5 до 1 уровня.

V. Наклон кресла

Нажмите кнопку "Наклон"

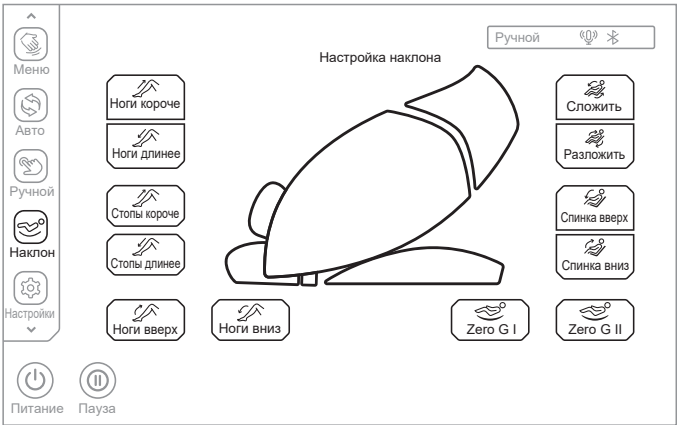 в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс регулировки наклона кресла, который изменяет длину и наклон подставки ног, наклон спинки, невесомость и другие функции.

Настройка наклона кресла

1. Настройка положения невесомости

Кнопка	Описание
	Кнопка Невесомость 1: автоматически настраивает положение подставки ног и спинки в положение невесомости 1.
	Кнопка Невесомость 2: автоматически настраивает положение подставки ног и спинки в положение невесомости 2.

2. Настройка длины блока для стоп (сдвигание / раздвигание)

Кнопка	Описание
	Кнопка сдвигания блока стоп подставки ног: Регулирует сдвиганием блока стоп вручную; нажмите и держите кнопку, чтобы сдвинуть блок стоп вверх, и отпустите для остановки.
	Кнопка раздвигания блока стоп подставки ног: Регулирует раздвиганием блока стоп вручную; нажмите и держите кнопку, чтобы раздвинуть блок стоп вниз, и отпустите для остановки.

Порядок эксплуатации

3. Настройка длины блока для икр (сдвигание / раздвигание)

Кнопка	Описание
	Кнопка сдвигания блока икр подставки ног: Регулирует сдвигание блока икр вручную; нажмите и держите кнопку, чтобы сдвинуть блок икр вверх, и отпустите для остановки.
	Кнопка раздвигания блока икр подставки ног: Регулирует раздвиганием блока икр вручную; нажмите и держите кнопку, чтобы раздвинуть блок икр вниз, и отпустите для остановки.

4. Настройка наклона подставки ног

Кнопка	Описание
	Кнопка подъема подставки ног: Поднимает подставку для ног вручную; нажмите и держите кнопку, чтобы поднять подставку вверх, и отпустите для остановки, после чего начинается автоматическое сканирование и определение длины стоп.
	Кнопка опускания подставки ног: Опускает подставку для ног вручную; нажмите и держите кнопку, чтобы опустить подставку вниз, и отпустите для остановки, после чего начинается автоматическое сканирование и определение длины стоп.


5. Складывание и раскладывание кресла

Кнопка	Описание
	Кнопка складывания кресла: Нажмите и держите кнопку, чтобы сложить кресло, и отпустите для остановки складывания, после чего начинается автоматическое сканирование и определение длины стоп.
	Кнопка раскладывания кресла: Нажмите и держите кнопку, чтобы разложить кресло, и отпустите для остановки раскладывания, после чего начинается автоматическое сканирование и определение длины стоп.


6. Настройка наклона спинки кресла

Кнопка	Описание
	Кнопка подъема спинки: Нажмите и держите кнопку, чтобы поднять спинку вверх, и отпустите для остановки.
	Кнопка опускания спинки: Нажмите и держите кнопку, чтобы опустить спинку вниз, и отпустите для остановки.

VI. Настройка (используйте эту функцию после включения кресла)

Нажмите кнопку "Настройки"  в строке меню в левой части экрана дисплея, чтобы войти в интерфейс настроек, в котором можно просмотреть модель кресла, номер версии ПО и ID. Интерфейс включает в себя настройки голосового управления, выбор языка и настройку Bluetooth соединения.


1. Модель кресла, версия ПО, ID кресла отображают информацию о текущем состоянии массажного кресла.
2. Bluetooth (Инструкция по подключению к динамикам кресла через Bluetooth)
 - (1) Нажмите переключатель Bluetooth, чтобы включить или отключить функцию. После сопряжения и подключения устройства-источника звука с Bluetooth (например, мобильного телефона, планшета и т.д.) к модулю Bluetooth кресла музыка, воспроизводимая источником звука, может быть передана по беспроводной сети в звуковую систему кресла для воспроизведения музыки.
 - (2) Войдите в главное меню мобильного устройства. Откройте "Настройки" и выберите опцию "Bluetooth". Откройте "Bluetooth", и Bluetooth автоматически выполнит "Поиск нового устройства Bluetooth".
 - (3) Мобильное устройство выполнит поиск Bluetooth кресла (например, IMCM XXXX). Нажмите кнопку "Соединить". Если вас спросят, нужно ли соединиться с креслом, вы просто выберите "Соединить", чтобы завершить соединение.
 - (4) Включите "Музыкальный плеер" на мобильном устройстве и выберите музыку для воспроизведения.

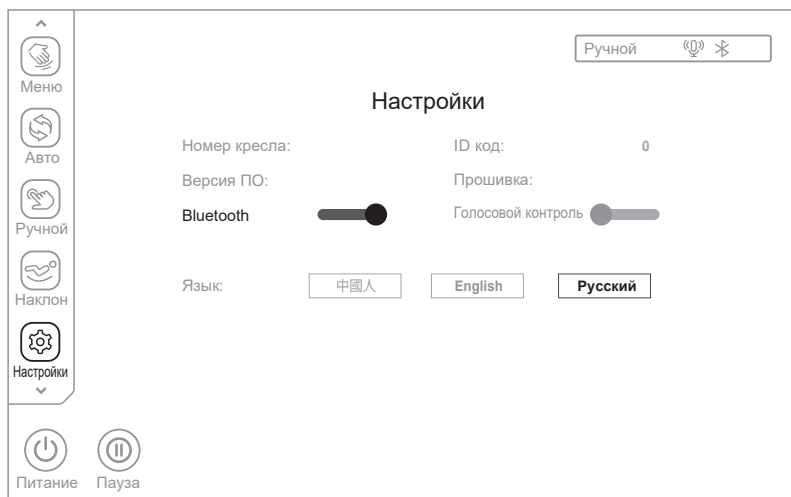

Интерфейс настройки


3. Установка языка интерфейса

По умолчанию установлен Русский язык и опционально можно выбрать также Английский и Китайский языки.

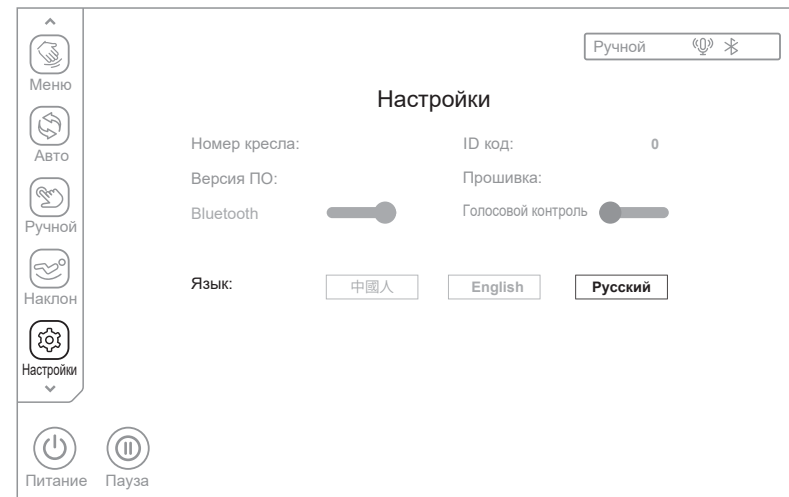

4. Голосовой контроль

Нажмите переключатель Голос контроль, чтобы включить или отключить функцию голосового управления. После включения голосовой функции вы можете управлять массажным креслом голосом в соответствии с содержанием голосового ввода.

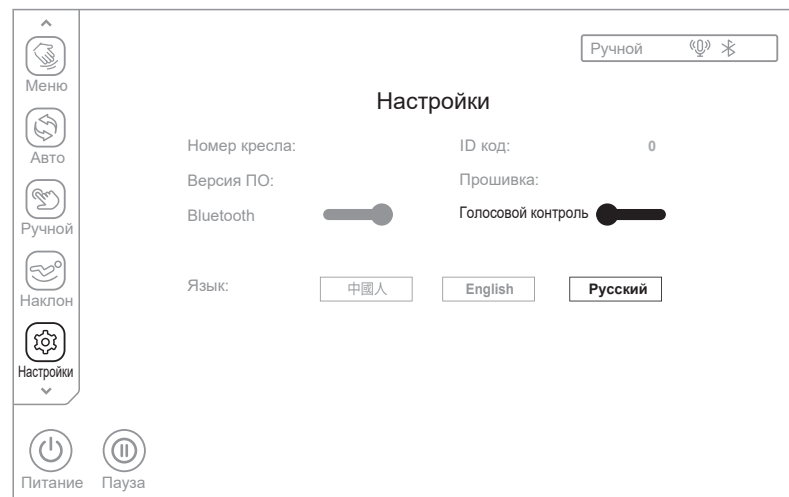

Порядок эксплуатации

- (1) Скажите в микрофон на левом подлокотнике “Привет, Элис” или “Салют, Элис”, чтобы активировать голосового помощника и он ответит “Я здесь”, чтобы показать, что он был активирован.
- (2) После пробуждения голосового помощника, пожалуйста, произнесите команду в течение 6 секунд, чтобы реализовать команду управления креслом. После того, как голосовой помощник ответит на команду, вы можете продолжить произносить команды. Интервал между двумя командами не может превышать 6 секунд, в противном случае необходимо повторно активировать голосового помощника.


Команды Голосового Контроля		
Запрос: “Привет Элис» или «Салют Элис». Ответ: «Я здесь»		
№	Голосовые команды	Выполняемые действия
1	Старт массаж	Активация массажа
2	Стоп массаж	Остановка массажа
3	Полный релакс	Активация программы Бинарный массаж
4	Тонус тела	Активация программы Энергия жизни
5	Сладкий сон	Активация программы Сон
6	Шея и Плечи	Активация программы Шея и Плечи
7	Короткий отдых	Активация программы Сиеста
8	Тайский массаж	Активация программы Тайский массаж
9	Старт компрессия	Активация воздушной компрессии
10	Стоп компрессия	Выключение воздушной компрессии
11	Поднять кресло вверх	Активация поднятия кресла вверх
12	Опустить кресло вниз	Активация опускания кресла вниз
13	Изменить режим массажа	Изменение режима массажа
14	Ролики вниз	Активация перемещения роликов вниз
15	Ролики вверх	Активация перемещения роликов вверх

Примечание: команды 14 и 15 можно использовать только после команды 13.

Порядок эксплуатации

VII. Оценка здоровья (используйте эту функцию после включения кресла)


1. Начало тестирования состояния здоровья
- Нажмите кнопку "Терапия" в строке меню левой части экрана, чтобы войти в интерфейс теста здоровья, нажмите кнопку "Начать" "Старт", для активации тестирования состояния здоровья, а затем аккуратно положите указательный или средний палец на датчик. Через несколько секунд он отобразит данные о частоте сердцебиения, содержании кислорода в крови и микроциркуляции в реальном времени, ожидайте завершения процесса тестирования.

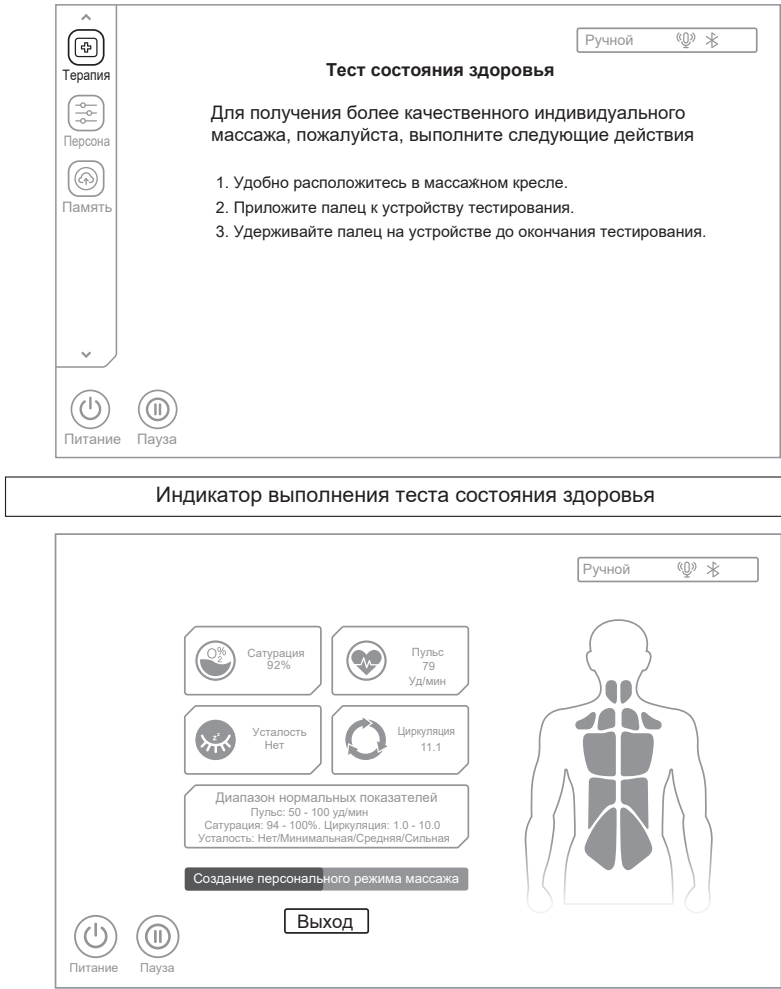

Порядок эксплуатации


2. Рекомендуемая программа

Когда тест здоровья будет завершен, на дисплее отобразятся частота пульса, сатурация и уровень усталости. Нормальная сатурация имеет диапазон от 95% до 99%. Уровень усталости включает: ее отсутствие, минимальную, среднюю и сильную. В зависимости от уровня вашей усталости вам будет рекомендована автоматическая программа. Выберите "Да", чтобы начать использование программы, или "Нет", чтобы вернуться к обычному режиму массажа до начала теста состояния здоровья.

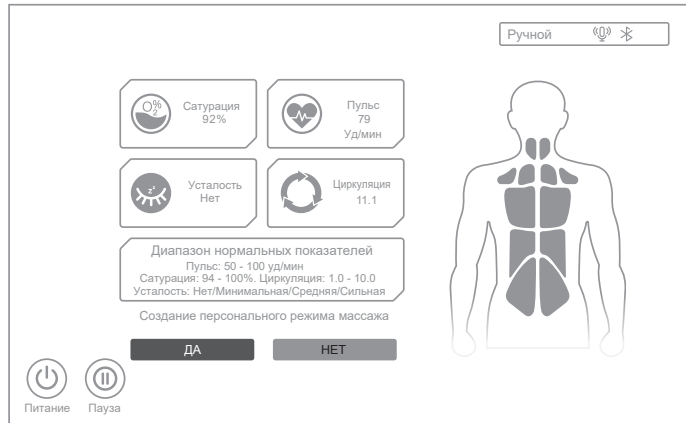

3. Достоверные данные не обнаружены.


Если достоверные данные не обнаружены, пользователю будет предложено повторное тестирование здоровья. Выберите "Да", чтобы перезапустить тестирование, или "Нет", чтобы вернуться к обычному режиму массажа до начала теста состояния здоровья.

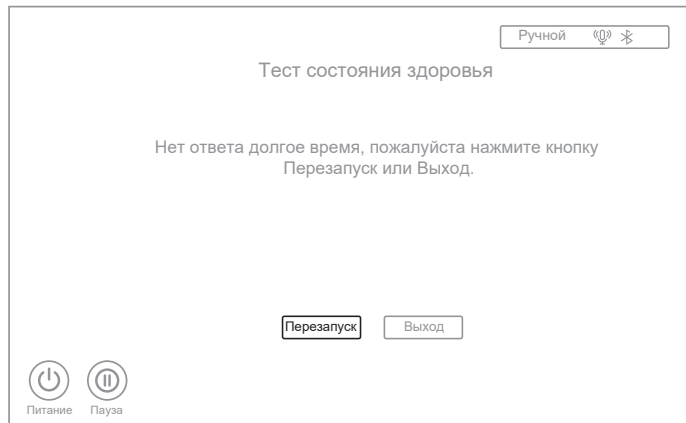

Порядок эксплуатации


4. Завершение тестирования состояния здоровья.

Во время тестирования нажмите кнопку **Выход**, чтобы выйти из этого режима и вернуться в обычный режим массажа.

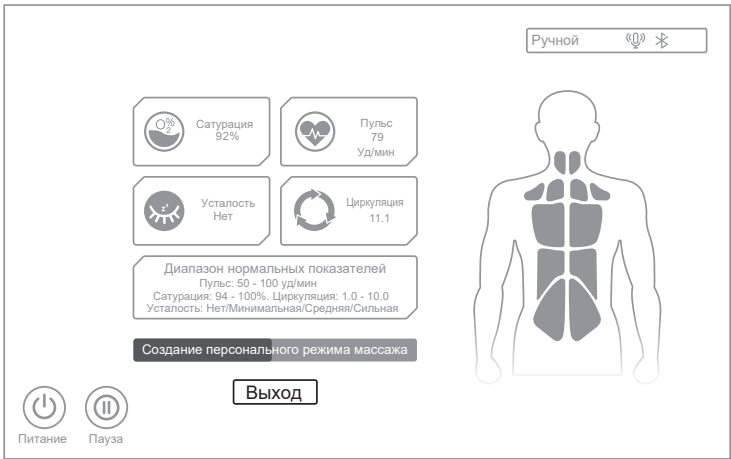

VIII. Персона (используйте эту функцию после включения кресла)


Нажмите кнопку "Персона" в строке меню в левой части дисплея, чтобы войти в интерфейс пользовательских настроек и выбрать либо Персона I, либо Персона II (только если соответствующая настройка была предварительно установлена и сохранена) для массажа.

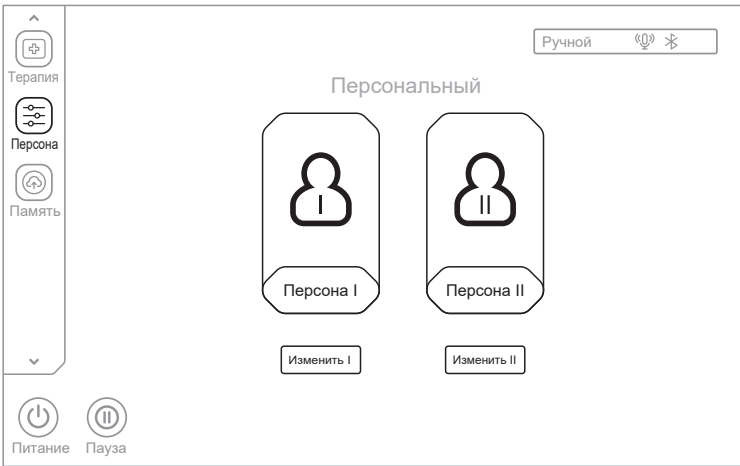

Интерфейс управления Персональным массажем


Порядок эксплуатации

Нажмите кнопку «Изменить I или II» для изменения персональных настроек. Затем выберите требуемую технику массажа, область, силу 4D, компрессию, ширину и скорость массажа, силу компрессии, прогрев спины, растирание икр и другие. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить текущие настройки. После сохранения программы Персона I или II доступна к применению.

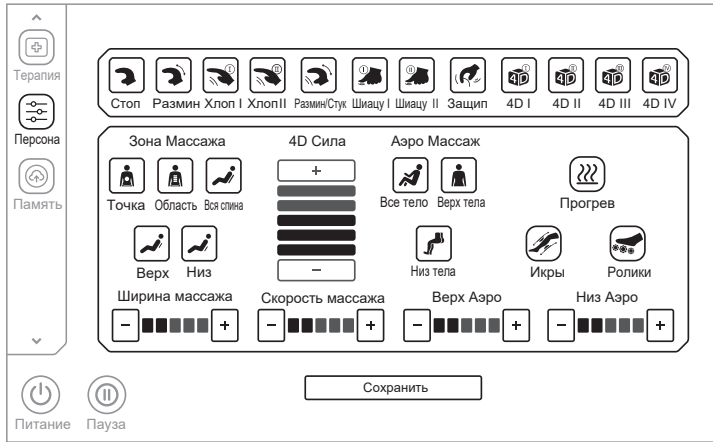

IX. Память (используйте эту функцию после включения кресла)

Нажмите кнопку "Память" в строке меню левой части дисплея, для входа в интерфейс памяти функций массажа с сохранением и использованием уже сохраненных функций массажа. Сохранение массажа имеет три кнопки: Сохранить I, Сохранить II и Сохранить III. Использование уже сохраненного массажа включает: Использовать I, Использовать II и Использовать III.

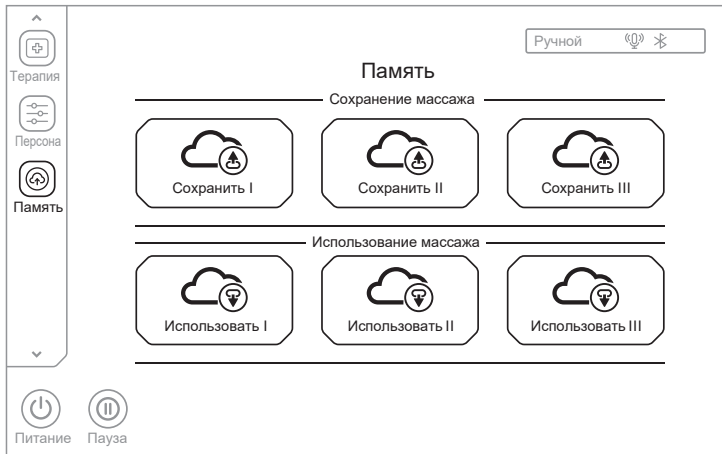


Порядок эксплуатации

Кнопка	Описание
	Сохранение массажа: Сохранение текущей программы массажа, включая автоматическую программу, технику массажа, режим компрессии и интенсивность, положение и угол наклона подставки ног и спинки, а также другие функции массажа.
	Использование массажа: Вызов ранее сохраненной программы массажа, включая автоматическую программу, технику массажа, режим компрессии и интенсивность, положение и угол наклона подставки ног и спинки, а также другие функции массажа.


X. Другие функции (используйте эту функцию после включения кресла)

1. В интерфейсе "Меню" нажмите кнопку "Прогрев", для включения или выключения прогрева спины. Спина нагревается в течение 3 минут.

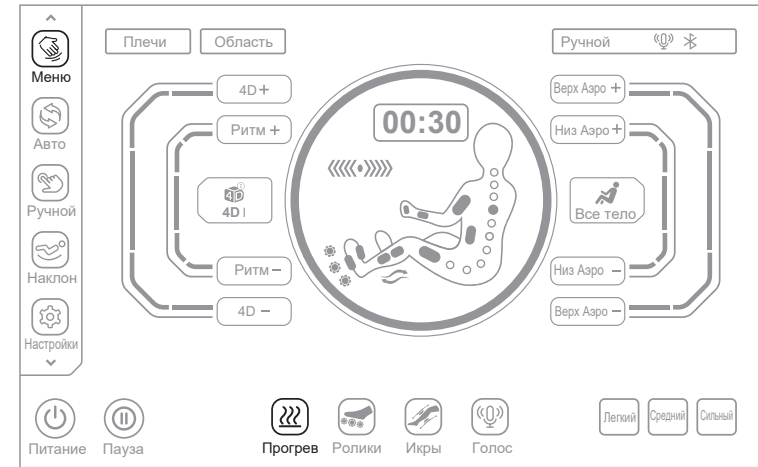


Порядок эксплуатации

2. В интерфейсе "Меню" нажмите кнопку "Ролики", чтобы включить или выключить функцию роликового массажа для стоп с 3 уровнями скорости. Каждое нажатие кнопки последовательно меняет скорость с уровнем 1, 2, 3 и затем стоп. Далее скорость роликового массажа стоп изменяется в циклической последовательности.

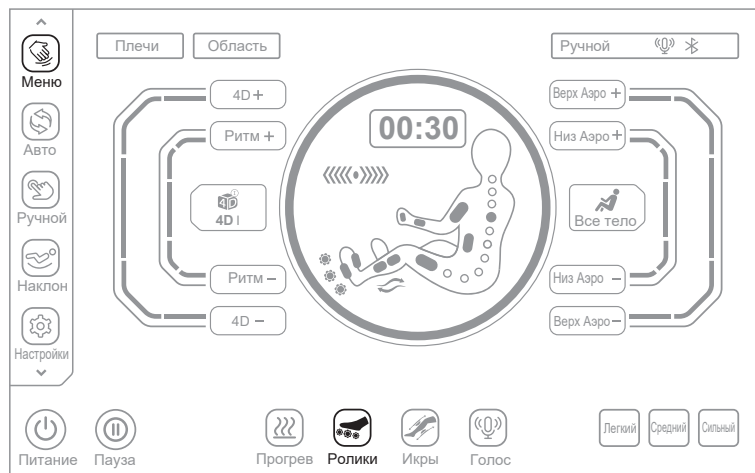


3. В интерфейсе "Меню" нажмите кнопку "Икры", чтобы активировать растирающий массаж икроножных мышц; растирающий массаж выполняется совместно с воздушной компрессией, что снимает скованность и напряжение икроножных мышц, вызванные длительным стоянием.

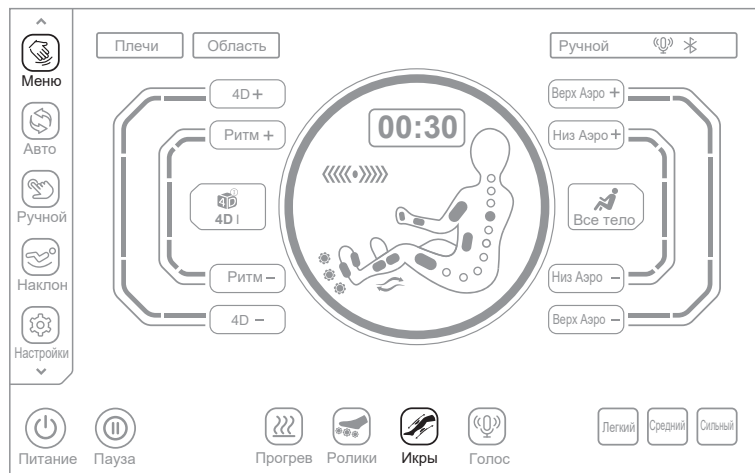


Порядок эксплуатации


4. В интерфейсе "Меню" нажмите кнопку "Голос", чтобы активировать голосовое управление массажем. Если при нажатии на эту кнопку издается звук «кап-кап», это означает что голосовой помощник не активирован. Перейдите в меню настроек, чтобы активировать функцию голосового управления. После этого Вы можете использовать голосовое управление.

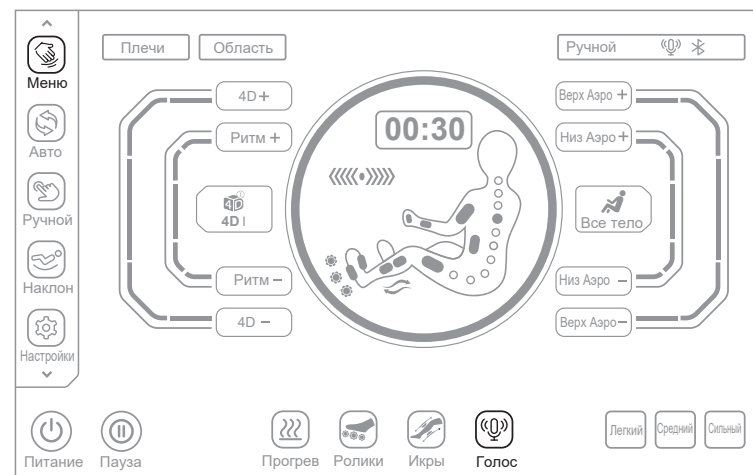




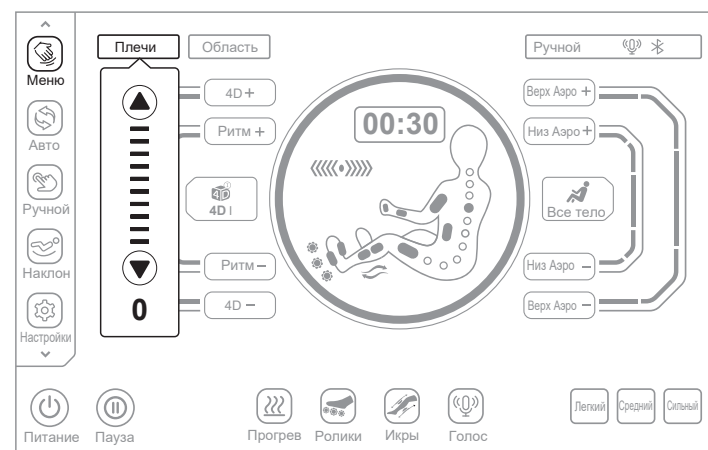

5. Дополнительно в интерфейсе «Меню» можно активировать функцию настройки положения плеч, нажав кнопку «Плечи» и затем нажимая на стрелки вверх и вниз во всплывающем меню, отрегулировать положение плеч по своему предпочтению, в общей сложности в диапазоне 11 уровней.

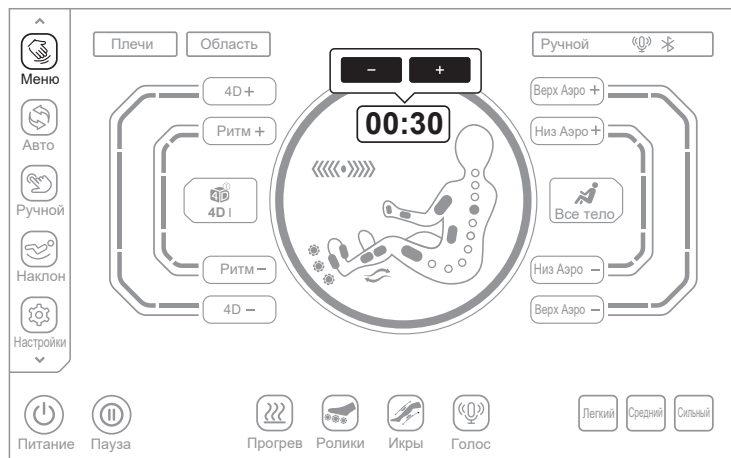


Порядок эксплуатации

6. Дополнительно в интерфейсе «Меню» , настраивается время массажа, нажав кнопку «настройка времени массажа 00:30», а затем нажимая кнопки «плюс +» и «минус -» во всплывающем меню, увеличить или уменьшить время массажа. Каждое нажатие кнопки изменяет время на 5 минут. Максимальное время массажа составит 40 минут, а минимальное время соответственно 5 минут.



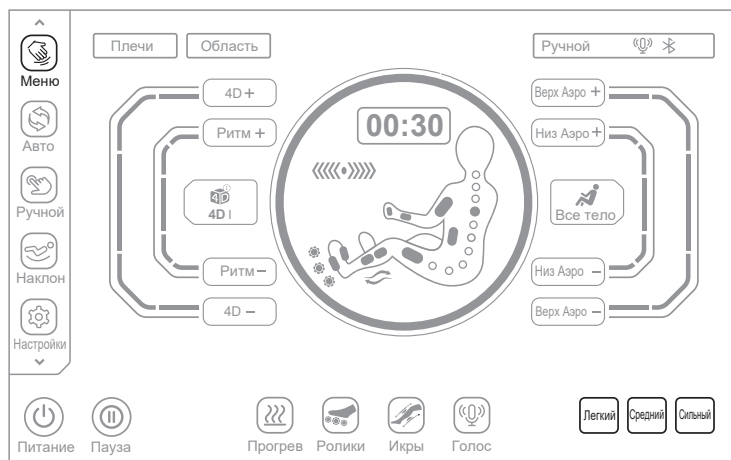

7. Дополнительно в интерфейсе «Меню»  можно выбрать интенсивность массажа. Для этого нажмите соответствующую кнопку «Легкий », кнопку «Средний » и кнопку «Сильный ».




Порядок эксплуатации

XI. Окончание массажа


Во время массажа нажмите кнопку Питание  на пульте управления или кнопку переключателя  на правом подлокотнике, чтобы выключить кресло. При этом сразу отключаются все функции массажа, спинка кресла и подставка ног возвращаются в стационарное положение. Также кресло автоматически отключается, когда заканчивается время сеанса, при этом все функции массажа будут автоматически отключены, спинка кресла и подставка ног не возвращаются в стационарное положение.




Отключите массажное кресло от сети питания, как показано на рисунке (принципиальная схема выключения питания кресла).

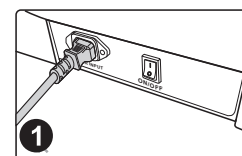

1
Выключите тумблер («0» положение)

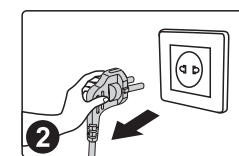

2
Отключите вилку из розетки

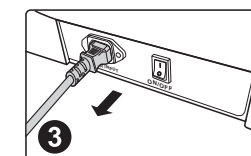


3
Отсоедините штекер кабеля из розетки

Порядок чистки и обслуживания

Чистка деталей из синтетической кожи и пластика

Протирайте детали из кожи мягкой сухой тканью.

- Не используйте химические вещества, такие как растворитель, бензин, спирт и т. д. для чистки массажного кресла.
- При использовании имеющихся в продаже средств по уходу за синтетической кожей, пожалуйста, следуйте инструкциям по применению.
- Если синтетическая кожа особенно загрязнена, протрите ее следующим образом.
 - ① Смочите мягкую ткань в воде или горячей воде, содержащей 3 - 5% нейтрального моющего средства, затем тщательно отожмите ее.
 - ② Используйте вышеуказанную мягкую ткань для протирания кожаной поверхности.
 - ③ Смойте чистящий раствор тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.
 - ④ Промокните отжатой мягкой тканью.
 - ⑤ Дайте поверхности высохнуть естественным путем на воздухе.
- Если трудно удалить пятна, пожалуйста, погрузите имеющуюся в продаже меламинавую пену в нейтральное моющее средство, а затем протрите им поверхность кресла.
- Не используйте фен для сушки поверхности кресла.
- Будьте осторожны при протирании кресла джинсовой или цветной тканью, так как они могут испачкать поверхность синтетической кожи кресла.
- Не допускайте контакта кожаных деталей с пластиком в течение длительного времени, так как это может привести к их обесцвечиванию.
- Синтетическая кожа может обесцветиться от окрашенных волос, поэтому при использовании кресла, пожалуйста, прикройте поверхность контакта с головой с помощью полотенца.

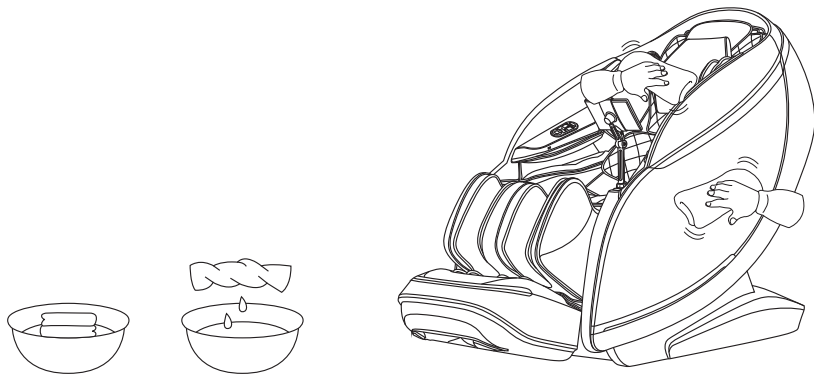

Устранение неполадок

Вопрос	При нажатии кнопки наклона, подставка для ног и спинка кресла наклоняются и потом останавливаются в определенном положении. При этом наклон больше не происходит и издается звук "бип, бип".
Решение	Из-за конструкции и эргономических требований, данное кресло имеет ограничение регулировки наклона. При этом при достижении максимального значения наклона звучит звуковой сигнал.
Вопрос	При включении кресла, его функции не работают или часть из них не включается.
Решение	После включения кресла нажатием кнопки питания необходимо вручную выбрать автоматическую программу массажа или другой рабочий режим. Если он не активирован, кресло автоматически выключится через 20 минут. Если выбран ручной режим работы, функции, которые не выбраны, могут быть отключены, и необходимый режим работы необходимо установить вручную.
Вопрос	При регулировке положения кресла издается звук трения кожи.
Решение	В кресле использована высококачественная износостойкая кожа, отвечающая требованиям охраны окружающей среды. Из-за присущих кожаным материалам характеристик при трении их поверхности в результате наклона кресла может возникать легкий шум, что является нормальным явлением. Примечание: Если вы услышите звук рвущейся ткани или кожи во время работы кресла, пожалуйста, немедленно прекратите использование и обратитесь за профессиональным техническим обслуживанием.
Вопрос	Массажные ролики не достигают области плеч или шеи.
Решение	Если голова не касается подголовника или спина не касается спинки кресла, положение плеч может быть отсканировано неверно. Плотно расположитесь в кресле и положите голову на подголовник, после чего начните сканирование заново.
Вопрос	Массажное кресло вышло из строя. Шнур питания или штепсельная вилка слишком сильно нагрелись.
Решение	Во избежание травм обязательно обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в сервисный центр по любым вопросам или в случае сомнений относительно работы данного кресла.

Спецификация

Для заметок

Модель		F800
Напряжение питания		~220-240 В 50-60 Гц
Мощность		220 Вт
Таймер		5 - 10 -15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 минут
Габариты (Д x Ш x В)	вертикальные	1570 x 820 x 1262 мм
	горизонтальные	1900 x 820 x 922 мм
Длина вылета подставки ног		примерно на 200 мм
Габариты упаковки (Д x Ш x В)		основной блок: 1650 x 760 x 950 мм боковые панели: 1450 x 570 x 190 мм подставка ног: 580 x 540 x 660 мм
Вес (Нетто / Брутто)		основной блок: 125 кг / 125 кг боковые панели: 9 кг / 9 кг подставка ног: 33 кг / 33 кг
Условия использования		температура окр. среды: от 0 до 35°C
		отн. влажность воздуха: 20% - 80% RH
Условия хранения		температура окр. среды: от - 5 до 35°C
		отн. влажность воздуха: 20% - 80% RH
Максимальная нагрузка		150 кг

Производитель: "Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd".
No.18 Xinglong Road, Furniture Garden, Wanquan Industry Base, Pingyang,
Wenzhou, Zhejiang, Китай

Представительство FUJIMO: ООО «Технологии Здоровья «Релакса»
140002, РФ, Московская обл., г.Люберцы, ул. Колхозная, д. 19А, пом. II
тел: 8(800)333-00-51
e-mail: service@relaxa.ru

